



El Gabi™ System

Instrucciones de uso para el cuidador



	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

Todos los derechos reservados ©2022 Gabi SmartCare® S.A. Todo el contenido de las presentes instrucciones de uso, incluidos los textos, marcas comerciales, marcas de servicio, logotipos, ilustraciones, fotografías, gráficos, diseño, etc., son propiedad de Gabi SmartCare® S.A. Gabi SmartCare® S.A. es propietaria de todos los derechos relativos a las marcas comerciales, marcas de servicio, logotipos y derechos de autor que aparecen en estas instrucciones de uso.

Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG Inc. Android es una marca comercial de Google Inc.



Datos de contacto del fabricante:  
 GABI SMARTCARE® SA  
 Rue Emile Francqui, 6  
 1435 Mont-Saint-Guibert  
 Bélgica

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

## Índice

<b>1.</b>	<b><u>LE DAMOS LA BIENVENIDA A GABI™</u></b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b><u>SOBRE SU GABI™ SYSTEM</u></b>	<b>7</b>
2.1	INSTRUCCIONES DE USO DEL DISPOSITIVO	7
2.2	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	7
2.3	CONTRAINDICACIONES	7
<b>3.</b>	<b><u>ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES GENERALES</u></b>	<b>9</b>
3.1	ADVERTENCIAS	9
3.2	PRECAUCIONES	10
3.3	PRECAUCIONES	11
3.3.1	USO Y ALMACENAMIENTO DE DISPOSITIVOS	11
3.3.2	AGUA Y HUMEDAD	11
3.3.3	CARGA DEL DISPOSITIVO	11
3.3.4	LIMPIEZA DE LA GABI™ BAND	11
3.3.5	MEDIDAS DE CIBERSEGURIDAD	11
<b>4.</b>	<b><u>SU GABI™ SYSTEM: INFORMACIÓN OPERATIVA</u></b>	<b>13</b>
4.1	CONTENIDO DE GABI™ KIT	13
4.2	COMPONENTES DEL GABI™ SYSTEM	13
4.2.1	LA GABI™ BAND	13
4.2.2	GABI™ MONITOR TABLET	14
4.2.3	LA GABI™ MONITOR APP	14
4.3	USE SU GABI™ SYSTEM: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	17
4.3.1	CONFIGURACIÓN DE LA GABI™ MONITOR APP	17
4.4	USO DE SU GABI™ SYSTEM: INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	27
4.4.1	ANTES DE INICIAR UN REGISTRO	27
4.4.2	AL FINAL DEL PERIODO DE REGISTRO	34
4.5	INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA	35
4.5.1	LIMPIEZA DE LA GABI™ BAND	36
4.5.2	LIMPIEZA DE LA GABI™ MONITOR TABLET	36
4.6	INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO	36
4.7	MANTENIMIENTO	36
<b>5.</b>	<b><u>USO DE LA GABI™ MONITOR APP: CARACTERÍSTICAS ADICIONALES</u></b>	<b>37</b>

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

<b>5.1</b>	<b>MENÚ DE AJUSTES .....</b>	<b>37</b>
5.1.1	ACCEDER A SUS DATOS PERSONALES Y MODIFICARLOS O ELIMINAR SU CUENTA.....	38
5.1.2	UTILIZAR UNA NUEVA RED WIFI .....	41
5.1.3	DEFINA O CAMBIE SU PIN PARA DESBLOQUEAR LA GABI™ MONITOR TABLET .....	41
<b>5.2</b>	<b>MENÚ DE AYUDA .....</b>	<b>41</b>
5.2.1	CÓMO COLOCAR LA BANDA .....	42
5.2.2	INSTRUCCIONES DE USO .....	42
5.2.3	MENCIONES LEGALES .....	43
5.2.4	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	44
<b>6.</b>	<b><u>FIN DEL USO: CÓMO DESECHAR SU GABI™ SYSTEM .....</u></b>	<b><u>48</u></b>
<b>7.</b>	<b><u>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....</u></b>	<b><u>49</u></b>
<b>7.1</b>	<b>ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO .....</b>	<b>49</b>
<b>7.2</b>	<b>ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO .....</b>	<b>49</b>
7.2.1	ALCANCE Y PRECISIÓN DE LA BIOMETRÍA .....	49
7.2.2	LONGITUDES DE ONDA PICO UTILIZADAS .....	53
7.2.3	ESPECIFICACIONES DE RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN .....	53
7.2.4	PANTALLA .....	53
<b>7.3</b>	<b>SISTEMA ELÉCTRICO.....</b>	<b>53</b>
7.3.1	POTENCIA .....	53
7.3.2	BATERÍA.....	54
<b>7.4</b>	<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS .....</b>	<b>54</b>
<b>7.5</b>	<b>VIDA ÚTIL.....</b>	<b>55</b>
<b>7.6</b>	<b>CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.....</b>	<b>55</b>
<b>7.7</b>	<b>DECLARACIÓN DEL FABRICANTE.....</b>	<b>55</b>
7.7.1	COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM) .....	56
<b>8.</b>	<b><u>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....</u></b>	<b><u>61</u></b>
<b>8.1</b>	<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LA GABI™ BAND.....</b>	<b>61</b>
8.1.1	LA LUZ BLANCA DE LA GABI™ BAND NO PARPADEA AL CONECTARSE EL CARGADOR .....	61
8.1.2	LAS LUCES VERDE Y ROJA DE LA PARTE INFERIOR DEL SENSOR DE LA GABI™ BAND NO PARPADEAN AL DESCONECTARLA DEL CARGADOR .....	61
8.1.3	SE ENCIENDE UNA LUZ AMARILLA, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA GABI™ BAND.....	62
8.1.4	UNA LUZ MORADA PARPADEA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA GABI™ BAND.....	62
8.1.5	NO ESTOY SEGURO DE HABER COLOCADO LA GABI™ BAND CORRECTAMENTE .....	63
8.1.6	MI HIJO TIENE MARCAS ROJAS EN EL LUGAR DE APLICACIÓN DE LA GABI™ BAND .....	63
<b>8.2</b>	<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LA GABI™ MONITOR APP .....</b>	<b>64</b>
8.2.1	NO PUEDO INICIAR EL REGISTRO Y LA CONEXIÓN CON LA GABI BAND ESTÁ EN ROJO .....	64
8.2.2	LA CONEXIÓN A INTERNET ES DE COLOR NARANJA .....	65
8.2.3	NO PUEDO INICIAR EL REGISTRO Y EL ICONO DE "BATERÍA" ESTÁ EN ROJO .....	65

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

8.2.4	PUEDO INICIAR EL REGISTRO PERO EL ICONO "BATERÍA" ESTÁ DE COLOR NARANJA.....	66
8.2.5	HAY ARCHIVOS QUE NO SE SUBEN A GABI CLOUD .....	67
8.2.6	LA GABI™ MONITOR APP SE CARGA SIN CESAR AL INTENTAR ABRIRLA .....	68
<b>8.3</b>	<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LA TABLET .....</b>	<b>69</b>
8.3.1	LA TABLET NO SE ENCIENDE .....	69
<b>9.</b>	<b><u>INDICACIONES LUMINOSAS DE LA GABI™ BAND .....</u></b>	<b>70</b>
<b>10.</b>	<b><u>SÍMBOLOS EN EL ETIQUETADO DE PRODUCTOS O ENVASES.....</u></b>	<b>72</b>
10.1	SÍMBOLOS DE CERTIFICACIÓN Y SEGURIDAD .....	72
<b>11.</b>	<b><u>INFORMACIÓN ADICIONAL .....</u></b>	<b>74</b>
11.1	ESTUDIOS CLÍNICOS .....	74
11.2	INFORMACIÓN SOBRE ENFERMEDADES Y CUIDADOS PERSONALES .....	74
11.3	EVENTOS ADVERSOS .....	74
11.4	GARANTÍA.....	74
11.5	PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN .....	74
11.6	VIAJES O USO INTERNACIONAL .....	75
<b>12.</b>	<b><u>INFORMACIÓN DE ASISTENCIA AL USUARIO .....</u></b>	<b>76</b>

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

## 1. Le damos la bienvenida a Gabi™

Gracias por formar parte de nuestra comunidad Gabi™. Gracias también por su confianza en nuestro producto. Para un uso óptimo de su Gabi™ system y para garantizar la seguridad del producto, le recomendamos encarecidamente que lea las siguientes instrucciones antes de empezar a utilizar su Gabi™ system.

Este manual incluye información para la correcta instalación y uso de Gabi™ system. También proporciona información sobre las características, funcionamiento, mantenimiento, limpieza y recomendaciones de seguridad.

Si no encuentra respuesta a sus preguntas en estas instrucciones de uso, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente (consulte los datos de contacto en la página 76).

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

## 2. Sobre su Gabi™ System

El Gabi™ system debe utilizarse bajo prescripción de su médico.

Tenga en cuenta que necesita acceder a una red wifi (solo de 2.4 GHz, ya que las redes de 5 GHz no son compatibles) con conexión a Internet para configurar su Gabi™ system y poder compartir los datos registrados con su médico.

El Gabi™ system forma parte de los productos Pediarity™.

### 2.1 Instrucciones de uso del dispositivo

El sistema Pediarity™ está pensado para su uso en el ámbito doméstico para el control puntual o el registro continuo de la frecuencia de pulso (PR) y la saturación funcional de oxígeno de la hemoglobina arterial (SpO2) de lactantes y niños con buena perfusión sanguínea y en condiciones en las que no hay movimiento.

El sistema Pediarity™ no es un dispositivo de monitoreo y no brinda alarmas fisiológicas durante su uso.

Las mediciones se envían a un servidor web para que un médico las revise de forma remota.

### 2.2 Descripción del producto

El Gabi™ system es una solución no invasiva, innovadora y avanzada que le permite medir de forma inalámbrica varios parámetros fisiológicos de su hijo en condiciones en las que no hay movimiento. Estos datos se comparten con su médico a través de su conexión a Internet.

El Gabi™ system está compuesto por:

- un brazalete inteligente, llamado Gabi™ Band (versión GSC2), colocado alrededor de la parte superior del brazo del niño
- una aplicación móvil, llamada Gabi™ Monitor App, instalada en una tablet específica

La Gabi™ Band incluye sensores que permiten medir el frecuencia de pulso (medición de la frecuencia cardíaca, es decir, el número de veces que el corazón late por minuto) y la saturación funcional de oxígeno (es decir, el nivel de oxígeno en sangre) de su hijo mientras duerme. También proporciona una indicación de los movimientos de su hijo. La Gabi™ Band se conecta vía Bluetooth a la Gabi™ Monitor Tablet, en donde se ejecuta la Gabi™ Monitor App, proporcionando la capacidad de iniciar/detener el registro, revisar los datos medidos por el Gabi™ system y enviar los datos recopilados a su médico vía wifi. Gracias al Gabi™ system, el médico de su hijo puede acceder continuamente a los parámetros fisiológicos de su hijo y revisarlos de forma remota.

Tenga en cuenta que el Gabi™ system no sustituye la supervisión de los padres.

### 2.3 Contraindicaciones

Use el Gabi™ system únicamente sobre piel intacta (sin heridas, tatuajes, hematomas, etc.).

El Gabi™ system **no proporciona alarmas fisiológicas**.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

El Gabi™ system no está diseñado para su uso como sistema de monitoreo de la apnea.

La población objetivo del Gabi™ system incluye lactantes y niños que pesen más de 2.5 kg (5.5 lbs), hasta los 12 años.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

### 3. Advertencias y precauciones generales

Los siguientes términos se utilizan para alertar al usuario de las posibles consecuencias de no seguir las instrucciones y para fomentar el uso seguro y adecuado del dispositivo.

Una "**ADVERTENCIA**" se refiere generalmente a una situación en la que existe un riesgo grave de daño o muerte si el dispositivo no se utiliza correctamente y que requiere una acción correctiva inmediata.

Una "**PRECAUCIÓN**" se refiere a una situación en la que existe un menor nivel de daño potencial, pero el usuario aún debe tener cuidado de seguir las instrucciones cuidadosamente para evitar cualquier evento adverso.

#### 3.1 Advertencias



No cargue la Gabi™ Band mientras se lleva puesta o está cerca de su hijo.



No use la Gabi™ Band mientras se esté cargando porque el cable del enchufe puede suponer un riesgo de estrangulamiento.



No use el Gabi™ system si parece estar dañado.



No repare, abra, desmonte ni modifique el equipo. Los daños en el dispositivo pueden provocar una disminución del rendimiento o lesiones en los niños.



Para evitar descargas eléctricas, no intente sustituir o extraer la batería de la Gabi™ Band.



No coloque la tablet en una posición que pueda provocar su caída sobre el niño.



No apriete demasiado la Gabi™ Band en el brazo del niño, ya que podría provocar lesiones por torniquete.



La Gabi™ Band no:

- Diagnostica, cura, alivia, monitorea, trata o previene enfermedades o lesiones,
- Afecta a las funciones/estructuras corporales,
- Logra los objetivos primarios previstos mediante la acción química,
- Previene el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad:



No use el Gabi™ system como herramienta de diagnóstico.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

-  No use el Gabi™ system si su médico le recomienda el uso de un pulsioxímetro de hospital.
-  No use el Gabi™ system si su médico le recomienda el uso de un monitor de apnea de hospital.
-  No use el Gabi™ system como excusa para hábitos de sueño inseguros.
-  Evite usar el Gabi™ system junto a otros equipos o apilado con ellos, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto. Si tal uso es necesario, este equipo y los otros equipos deben controlarse para verificar que funcionan normalmente.
-  No use ningún otro cable o adaptador de corriente que no sea el suministrado con el Gabi™ system, ya que podría afectar negativamente a la seguridad eléctrica o a la compatibilidad electromagnética.
-  No haga cortocircuito entre los pines del conector del cable de carga de la Gabi™ Band.
-  No toque el cable de alimentación y al niño al mismo tiempo.
  
-  No use equipos portátiles de comunicaciones por radiofrecuencia (incluidos periféricos como cables de antena y antenas externas) a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del Gabi™ system, incluidos los cables de alimentación suministrados con el Gabi™ system.
-  En caso de que el Gabi™ system no funcione como se espera, considere la posibilidad de que haya alteraciones electromagnéticas que afecten al dispositivo. Reubique el equipo o apague el equipo que origina la alteración.
-  Si no usa la Gabi Band de forma habitual, cárguela al menos cada 3 meses.
-  No use el Gabi System durante una resonancia magnética (RM) o en un entorno de RM.

### 3.2 Precauciones

-  No use la Gabi™ Band con ninguna herramienta de monitoreo que no sea el Gabi™ Monitor App.
-  Inspeccione y cambie el lugar de aplicación de la Gabi™ Band cada 10 horas para proteger la integridad de la piel. La sensibilidad del paciente a los sensores puede variar según el estado de la piel.
-  Tenga en cuenta que el movimiento de los niños reduce la precisión de la biometría.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

 Tenga en cuenta que una posición inadecuada de la Gabi™ Band influye en la precisión de la biometría.

 No utilice productos de limpieza cáusticos o abrasivos.

### 3.3 Precauciones

#### 3.3.1 Uso y almacenamiento de dispositivos

La Gabi™ Band y la tablet no son juguetes. Debe asegurarse de mantener la Gabi™ Band (mientras no se utilice) y la tablet fuera del alcance de los niños.

La tablet está configurada en modo kiosco, lo que significa que puede utilizarse con el único fin de monitorear los datos de biometría del niño medidos por la Gabi™ Band.

#### 3.3.2 Agua y humedad

Le recomendamos que mantenga su Gabi™ system alejado de áreas extremadamente húmedas y de fuentes de agua. El agua y la humedad pueden provocar fallos en el funcionamiento del aparato.

#### 3.3.3 Carga del dispositivo

Su Gabi™ Band debe cargarse cuando no se esté utilizando para que esté completamente cargada para el siguiente registro.

Su Gabi™ Monitor Tablet puede utilizarse cuando se alimenta con su batería interna. Sin embargo, para garantizar un registro ininterrumpido, recomendamos que la Gabi™ Monitor Tablet permanezca conectada al adaptador de carga durante su uso. Asegúrese de seguir las instrucciones de seguridad y mantenga la Gabi™ Monitor Tablet, el cable de carga y el adaptador de corriente fuera del alcance de los niños.

#### 3.3.4 Limpieza de la Gabi™ Band

Siga atentamente las instrucciones del capítulo 4.5 Instrucciones de limpieza (consulte la Página 35).

#### 3.3.5 Medidas de ciberseguridad

Para garantizar la seguridad de su red, es importante tomar las precauciones necesarias. Le recomendamos encarecidamente que siga las siguientes indicaciones:

- 1- Mantenga actualizada su infraestructura de red: actualice periódicamente sus dispositivos de red, incluidos los routers domésticos, a las últimas versiones disponibles. De este modo, se garantiza la ejecución del software más seguro y estable en sus dispositivos.
- 2- Evite los nombres de usuario y contraseñas predeterminados: cambie las credenciales de inicio de sesión predeterminadas proporcionadas por sus dispositivos de red. Los nombres de usuario y contraseñas predeterminadas son ampliamente conocidos y pueden hacer que su red sea

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

vulnerable a accesos no autorizados. Elija combinaciones únicas y potentes para aumentar la seguridad.

- 3- Use contraseñas seguras para todas las cuentas de usuario: es crucial establecer contraseñas seguras para todas las cuentas de usuario asociadas a su red. Una contraseña segura consiste en una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. Esto hace que sea más difícil para los atacantes adivinar o descifrar sus contraseñas.
- 4- Cambie la dirección IP predeterminada del router: modificar la dirección IP predeterminada de su router agrega una capa extra de protección. Los atacantes suelen atacar los routers que utilizan direcciones IP predeterminadas, por lo que cambiarla reduce las posibilidades de acceso no autorizado.
- 5- Desactive las funciones de acceso remoto: para minimizar el riesgo de manipulación externa de su infraestructura de red, es aconsejable desactivar las funciones de acceso remoto en el router. El acceso remoto permite que personas ajenas a su red accedan a ella y la pongan potencialmente en peligro. Desactivar esta función garantiza que solo los usuarios autorizados de la red puedan realizar cambios.

Al seguir estas recomendaciones, puede mejorar significativamente la seguridad de su red y protegerla de posibles amenazas.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

## 4. Su Gabi™ system: información operativa

### 4.1 Contenido de Gabi™ Kit

El Gabi™ Kit adjunto contiene este manual de usuario, una guía de configuración rápida y los siguientes componentes:



(1) Una unidad de sensor Gabi™ Band



(2) 4 brazaletes de diferente tamaño (S, M, L, XL)



(3) Un adaptador de corriente y un cable de carga<sup>1</sup> para cargar la Gabi™ Band



(4) La Gabi™ Monitor App instalada en una tablet específica y su adaptador de corriente y cable de carga USB-C

### 4.2 Componentes del Gabi™ System

#### 4.2.1 La Gabi™ Band

La **Gabi™ Band** es un dispositivo portátil de registro que se coloca alrededor de la parte superior del brazo del niño. Se compone de un brazaletes textil de tamaño ajustable y de una carcasa rígida que incluye 2 sensores principales, una batería recargable y capacidades de Bluetooth de baja energía o BLE (la unidad del sensor). Mide continuamente el nivel de oxígeno en la sangre y la frecuencia de pulso mediante una tecnología basada en la luz, denominada fotopletismografía (PPG), como en un reloj inteligente. También incluye un acelerómetro para medir los movimientos del niño.

La Gabi™ Band debe utilizarse en condiciones donde no haya movimiento; es decir, mientras el niño duerme, para garantizar la calidad de los datos registrados.

A continuación le presentamos los principales componentes de la Gabi™ Band:

- A. Brazaletes en diferentes tallas (S/M/L/XL)
- B. Luz de estado (consulte la Sección 9 para obtener más información sobre las indicaciones luminosas)
- C. Pines para cargar la batería

<sup>1</sup>Se trata de un cable específico que solo puede utilizarse con Gabi™ Band. No utilice ningún otro cable USB con la Gabi™ Band ni utilice este cable con otros dispositivos.

	<b>Pediarity™</b> Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	<b>Versión L</b>
		09 de enero de 2024

- D. Cierre de brazaletes elástico
- E. Sensor de luz (PPG)

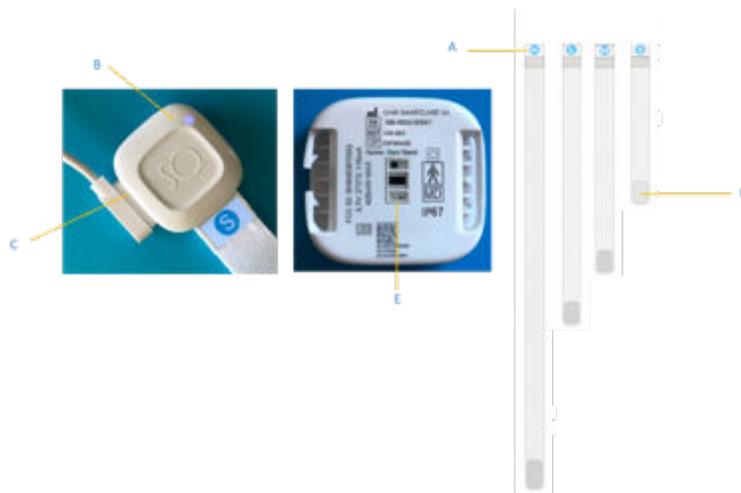


Figura 1: componentes principales de la Gabi Band

#### 4.2.2 Gabi™ Monitor Tablet

La Gabi™ Monitor Tablet incluye una pantalla táctil (consulte D en la Figura ci-dessous), en la que interactuará con la Gabi™ Monitor App.



Figura 2: Gabi Monitor Tablet

- A. Cámara
- B. Botones de volumen
- C. Botón de encendido/apagado
- D. Pantalla táctil

#### 4.2.3 La Gabi™ Monitor App

Los datos recopilados por la Gabi™ Band se transmiten de forma inalámbrica a través de Bluetooth a una tablet específica (la Gabi™ Monitor Tablet), en la que está instalada la Gabi™ Monitor App, que permite iniciar y detener el registro de la Gabi™ Band y visualizar los datos medidos. Para

	<b>Pediarity™</b> Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	Versión L
		09 de enero de 2024

garantizar un registro correcto de los datos, la **tablet dedicada debe dejarse a menos de 7 metros (23 pies) del niño mientras la Gabi™ Band esté registrando.**

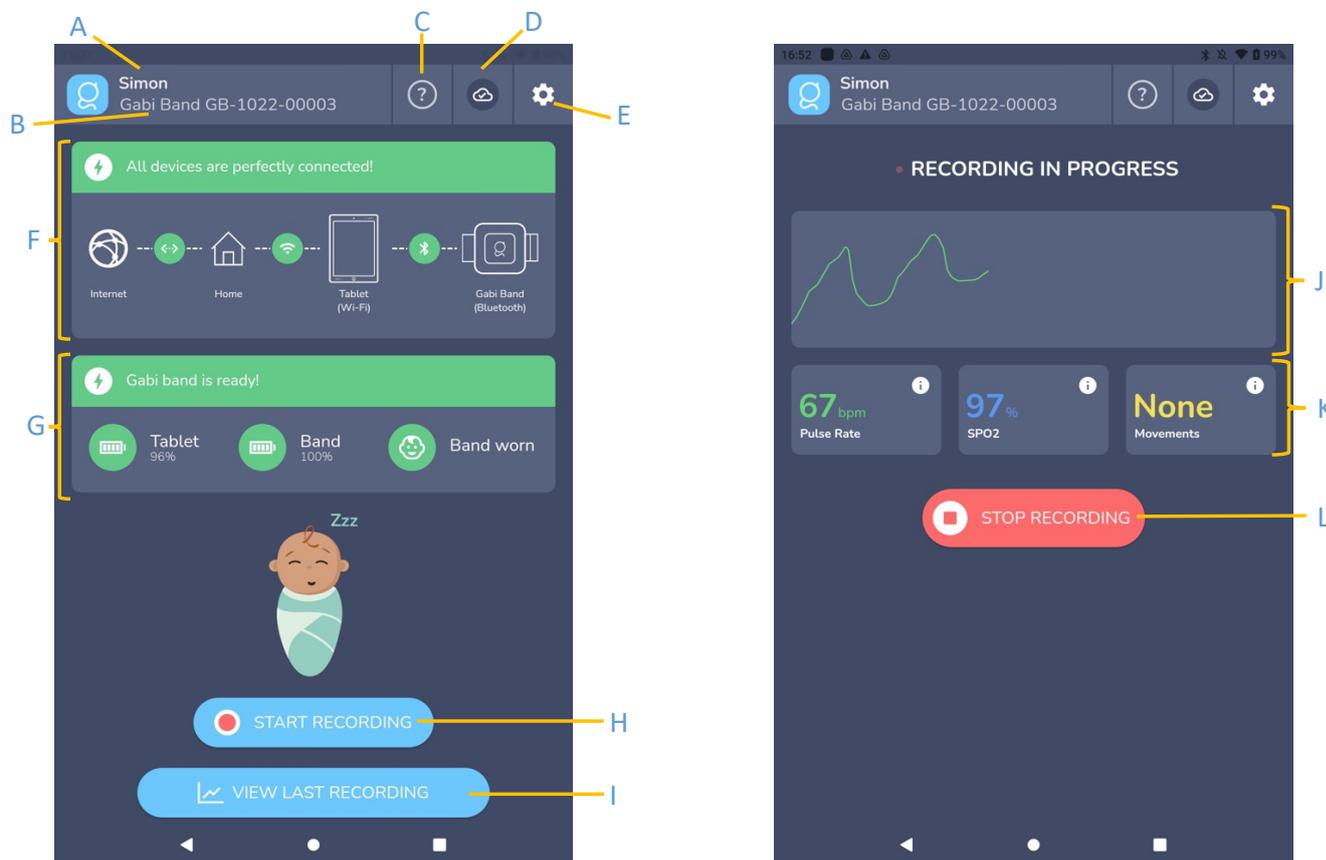


Figura 3: pantallas principales de la Gabi Monitor App

Consulte a continuación las principales características de la Gabi™ Monitor App:

- A. Nombre del niño
- B. Número de serie de la Gabi™ Band: número de serie (formato GB-XXXX-XXXXX) de la Gabi™ Band que está conectada a la aplicación.
- C. Enlace al menú de ayuda (que incluye instrucciones para colocarse correctamente la banda, un enlace a esta guía del usuario y las menciones legales)
- D. Estado del intercambio de datos con su médico:
  - "  " la carga de datos se realizó correctamente
  - "  " la Gabi™ Monitor App no está conectada a internet
  - "  " la carga de datos está en progreso
- E. Configuración de la aplicación (ver detalles más adelante).
- F. Estados de la conexión:
  - Conexión entre Internet y el router doméstico

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

- Conexión entre el router doméstico y la Gabi™ Monitor Tablet
- Conexión entre la Gabi™ Monitor Tablet y la Gabi™ Band

G. Estados de la Gabi™ Band:

- Conexión con la Gabi™ Band: estado de la conexión entre la Gabi™ Band y la tablet.
- Batería: nivel de batería de la Gabi™ Band.
- Gabi Band puesta: indicación de si la Gabi™ Band está puesta o no.

Tenga cuidado, este estado no indica que esté correctamente colocada en el brazo del niño.

H. Botón de inicio de registro.

I. Botón "View Last Recording" (Ver último registro), que permite obtener un resumen del último registro.

J. Datos en directo, que muestran que las mediciones están en curso y son recibidas por la Gabi™ Monitor App

K. Datos medidos por la Gabi™ system en tiempo real, durante un registro; por ejemplo:

- La **frecuencia de pulso (PR)**: la frecuencia de pulso es la velocidad a la que late el corazón. La frecuencia de pulso se mide en latidos por minuto (lpm). Varía mucho entre los adultos, dependiendo del estado general de salud, el tamaño corporal, los niveles de actividad y las afecciones médicas. La frecuencia de pulso es más baja cuando está descansando o durmiendo que cuando está despierto o haciendo ejercicio/moviéndose. La frecuencia de pulso de los niños y lactantes también varía, pero es inherentemente más alta que la de los adultos. Un "--" indica que la calidad de la señal es demasiado baja para proporcionar una precisión correcta o que la frecuencia de pulso está fuera del rango admitido (consulte la definición de rango admitido en la Sección 7.2.1 en la Página 49).
- La **Saturación de oxígeno (SpO<sub>2</sub>)**: la saturación de oxígeno (SpO<sub>2</sub>) indica la cantidad de oxígeno que recorre el cuerpo con los glóbulos rojos. El nivel de oxígeno en sangre se mide en porcentaje (%). Un nivel de oxígeno en sangre inferior al normal se define como hipoxemia. Un "--" indica que la calidad de la señal es demasiado baja para proporcionar una precisión correcta o que la SpO<sub>2</sub> está fuera del rango admitido (consulte la definición de rango admitido en la Sección 7.2.1 en la Página 49).
- **Movimientos**: magnitud de los movimientos detectados, es decir: "Ninguna", "Baja", "Media" o "Alta". Es importante tener en cuenta que los movimientos pueden afectar a la precisión de las mediciones de la frecuencia de pulso y la saturación de oxígeno.

L. Botón de detención de registro.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

### 4.3 Use su Gabi™ system: instrucciones de instalación

Saque los objetos de la caja. Puede guardar la caja para viajar fácilmente con su Gabi™ system.

- (1) Conecte la Gabi™ Monitor Tablet suministrada a su adaptador de corriente mediante el cable de carga USB-C suministrado.
- (2) Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente (fuera del alcance de los niños).

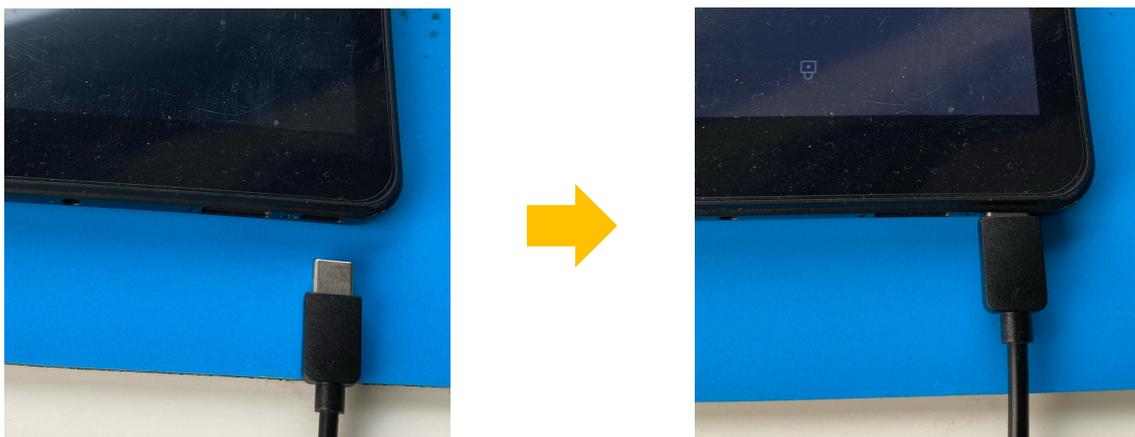


Figura 4: carga de la Gabi Monitor Tablet

#### 4.3.1 Configuración de la Gabi™ Monitor App

Para poder completar esta configuración, se necesita una red wifi (**solo de 2.4 GHz**, ya que las redes de 5 GHz no son compatibles) con conexión a Internet.

- (1) Encienda la Gabi™ Monitor Tablet (consulte el botón C de la Figura 2 en la Página 14)
- (2) Si aún no lo ha hecho, inicie la Gabi™ Monitor App
- (3) Elija su idioma y pulse el botón "START" (INICIAR)



Figura 5: proceso de instalación de la Gabi Monitor App: selección de idioma

	Pediarity™ Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	Versión L
		09 de enero de 2024

- (4) Aparece una pantalla de bienvenida. Pulse el botón "YES, PLEASE!" (SÍ, POR FAVOR) cuando esté listo para continuar. Se muestra el contenido del kit Gabi. Pulse el botón "UNDERSTOOD" (ENTENDIDO) cuando esté listo para configurar la Gabi™ Monitor App.

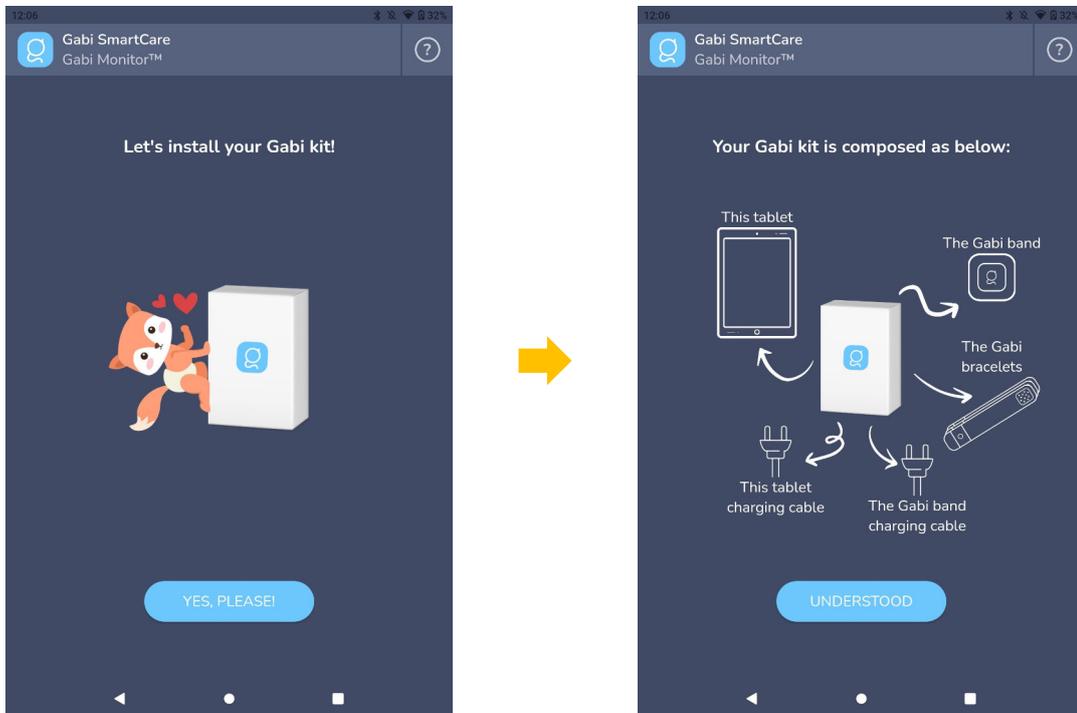


Figura 6: proceso de instalación de la Gabi Monitor App: pantalla de bienvenida y contenido del kit

- (5) Configure su red wifi pulsando el botón "WI-FI SETTINGS" (AJUSTES DE WIFI). En la lista de redes wifi detectadas, seleccione la red correcta e ingrese la contraseña necesaria. Cuando la Gabi™ Monitor Tablet esté conectada a Internet, pulse el botón de volver de la tablet (triángulo en la parte inferior de la pantalla). La Gabi™ Monitor App muestra que la conexión a Internet se estableció correctamente. Tenga en cuenta que la Gabi™ Monitor Tablet solo puede conectarse a redes wifi de **2.4 GHz**. Las redes wifi de 5 GHz no son compatibles

	<b>Pediarity™</b> Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	Versión L
		09 de enero de 2024

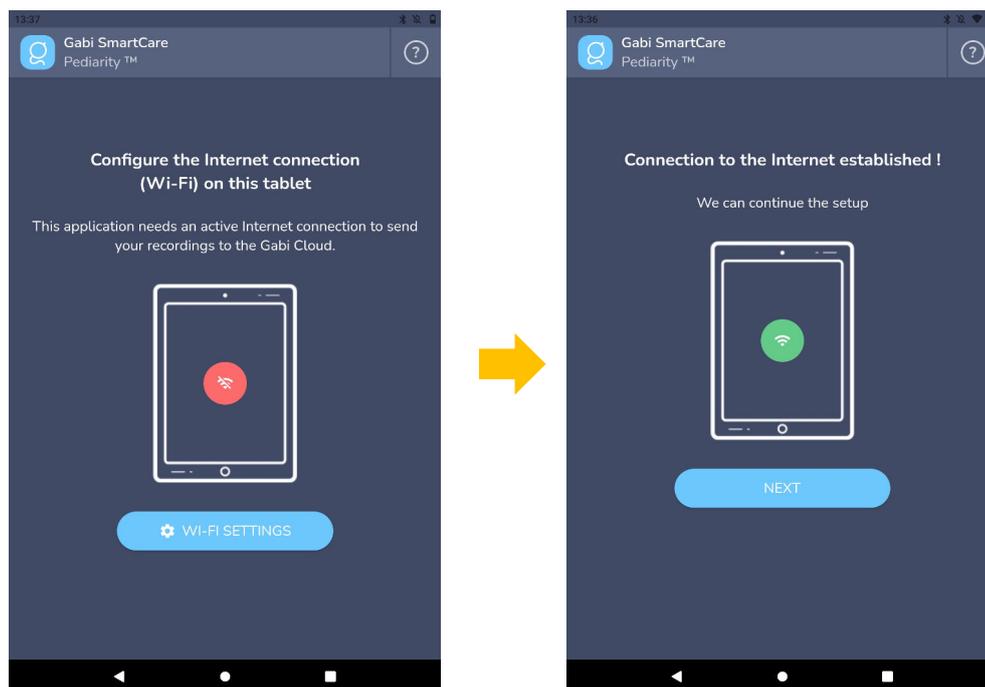


Figura 7: proceso de instalación de la Gabi Monitor App: pantallas de conexión a internet

(6) La Gabi™ Monitor App le pide que confirme la fecha y hora actuales.

Si la fecha y la hora mostradas son las actuales, pulse el botón "YES" (SÍ).

Si la fecha y la hora mostradas no son las actuales, pulse el botón "NO, OPEN SETTINGS" (NO, ABRIR AJUSTES). Se le redirigirá a la página de configuración horaria de la Gabi™ Monitor Tablet. Defina la fecha y hora y vuelva a la Gabi™ Monitor App. Cuando haya terminado de ajustar la fecha y la hora, aparecerá una pantalla pidiéndole que continúe. Si está listo para continuar, pulse el botón "CONTINUE" (CONTINUAR).

	<b>Pediarity™</b> Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	<b>Versión L</b>
		09 de enero de 2024

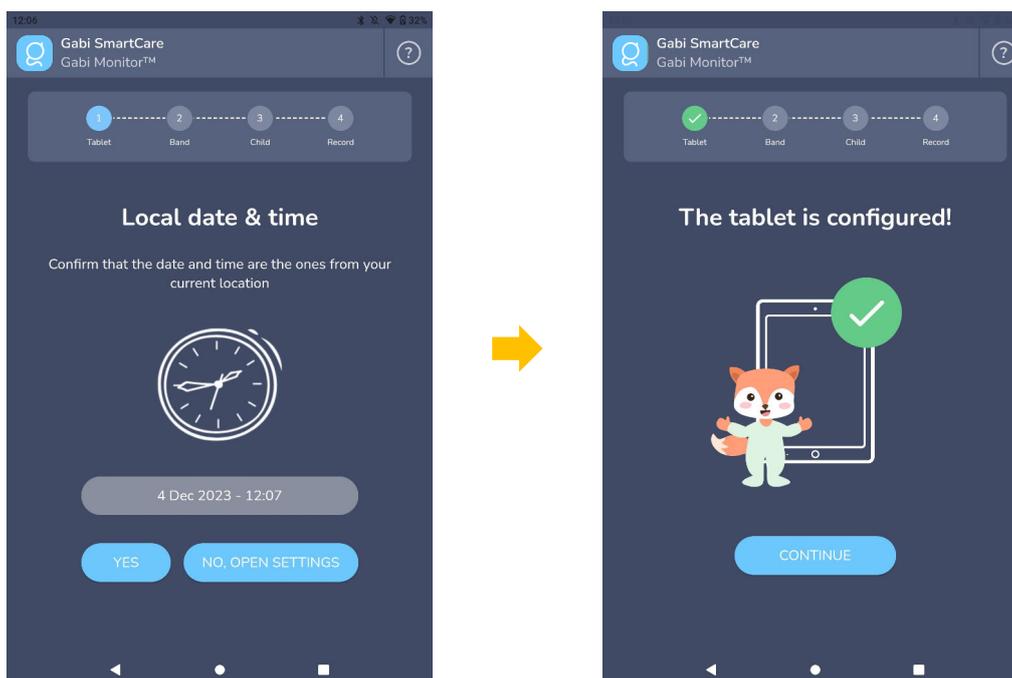


Figura 8: proceso de instalación de la Gabi Monitor App: comprobación de fecha y hora

- (7) La Gabi™ Monitor App muestra los elementos del kit Gabi que necesitará para el siguiente paso. Pulse el botón "START" (INICIAR) cuando esté listo para continuar.



Figura 9: Configuración de la Gabi Band: elementos necesarios

- (8) Seleccione el brazalete de la talla adecuada en función del perímetro de la parte superior del brazo de su hijo (si lo conoce) o de su peso. Puede utilizar el regulador de la Gabi™ Monitor App para obtener la talla de brazalete adecuada o la Tabla 1 ci-dessous. Cuando haya seleccionado la talla correcta, puede pulsar el botón "OK" (ACEPTAR) en la Gabi™ Monitor App.

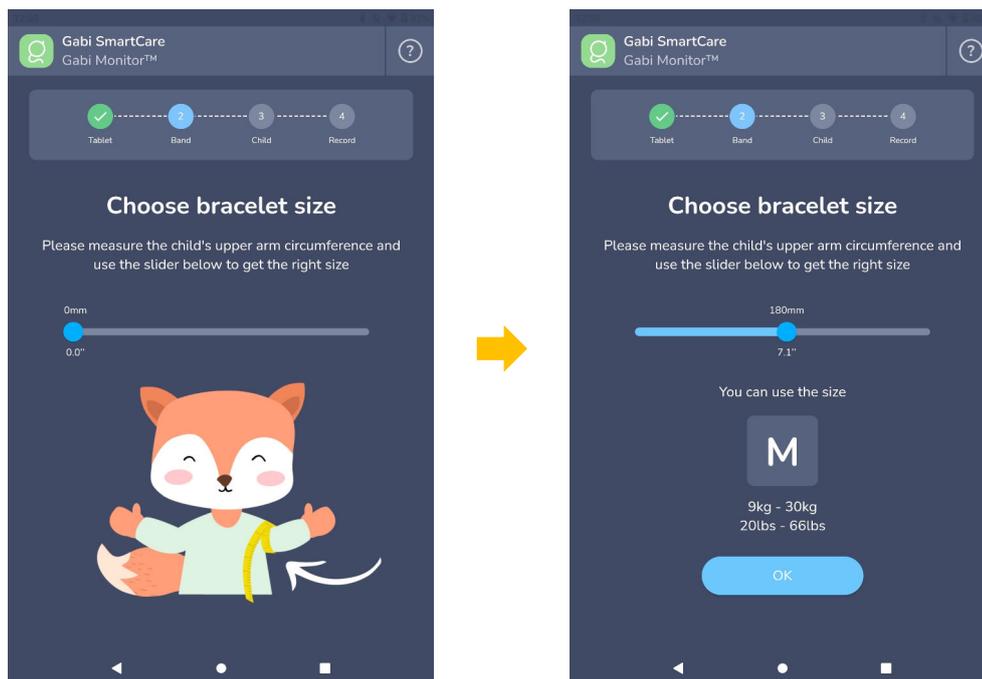


Figura 10: proceso de instalación de la Gabi Monitor App: talla del brazalete

Tabla 1: talla de la banda en función de las medidas del niño

Talla de la banda	S	M	L	XL
Circunferencia de la parte superior del brazo del niño	<160 mm (<6.3")	150 mm a 200 mm (5.9" a 7.9")	190 mm a 260 mm (7.5" a 10.2")	>250 mm (>9.8")
Peso del niño	<15 kg (<33 lbs)	9 kg a 30 kg (20 lbs a 66 lbs)	22 kg a 45 kg (49 lbs a 99 lbs)	>40 kg (>88 lbs)

- (9) Sujete la Gabi™ Band con una mano, con los sensores hacia arriba, y con la otra sujete el brazalete, con la etiqueta de la talla hacia abajo.

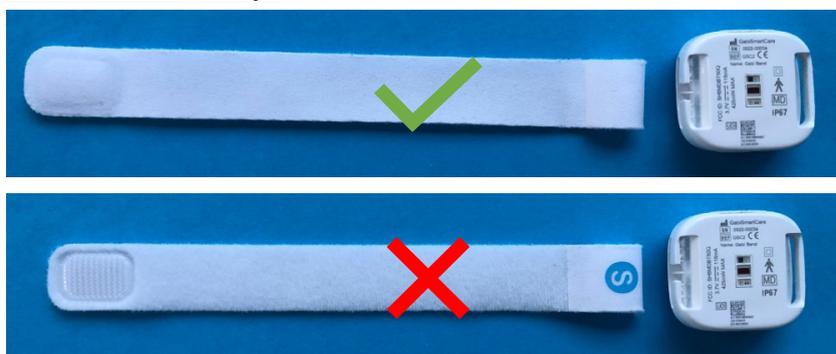


Figura 11: orientación de la correa

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

- (10) Fije la parte del bucle del brazalete a las pequeñas protuberancias que se encuentran en uno de los lados del sensor de la Gabi™ Band. Estas protuberancias sirven de puntos de fijación del brazalete y permiten cambiarlo cuando sea necesario. Si necesita sacar el brazalete, sea extremadamente cuidadoso para evitar romper las protuberancias de la unidad de sensores.



Figura 12: montaje de la Gabi Band

- (11) En la Gabi™ Monitor App, pulse el botón "CONTINUE" (CONTINUAR).

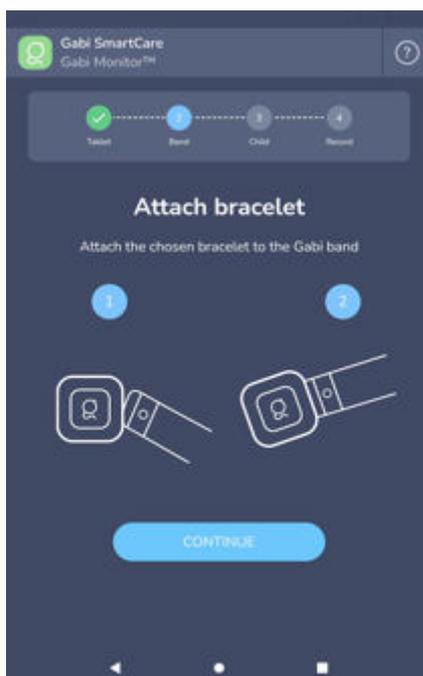


Figura 13: proceso de instalación de la Gabi Monitor App: conectar el brazalete

- (12) Conecte el cable de carga suministrado de la Gabi™ Band al adaptador de corriente suministrado. A continuación, conecte el cable de carga de la Gabi™ Band al puerto de carga de la Gabi™ Band.
- (13) Conecte el cargador a un tomacorriente (fuera del alcance de los niños). Una luz blanca debería empezar a parpadear en la Gabi™ Band, indicando que se está cargando.



No cargue la Gabi™ Band mientras se lleva puesta o cuando esté colocada cerca de su hijo.

	PEDIARITY™ Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	Versión L 09 de enero de 2024



Figura 14: Gabi Band cargando

- (14) Una vez que la Gabi Band se esté cargando, pulse el botón "CONTINUE" (CONTINUAR).



Figura 15: proceso de instalación de la Gabi Monitor App: conexión de la pantalla de la banda

- (15) Empareje la Gabi™ Band con la Gabi™ Monitor Tablet. La Gabi™ Monitor App está escaneando la comunicación Bluetooth para encontrar la Gabi™ Band. Revise el número de identificación de su Gabi™ Band en la parte posterior de la unidad de sensor de la Gabi™ Band o en la caja de embalaje. Este identificador se compone de los caracteres "GB-XXXX-XXXX". Cuando aparezca el ID de su Gabi™ Band, selecciónelo pulsando sobre el ID que aparece en la pantalla. El emparejamiento está en curso. Tenga en cuenta que su Gabi™ Band solo es accesible para el emparejamiento durante los primeros 5 minutos después de conectar la Gabi™ Band a la corriente. Si su Gabi Band no aparece en la lista, desconéctela y vuelva a conectarla.

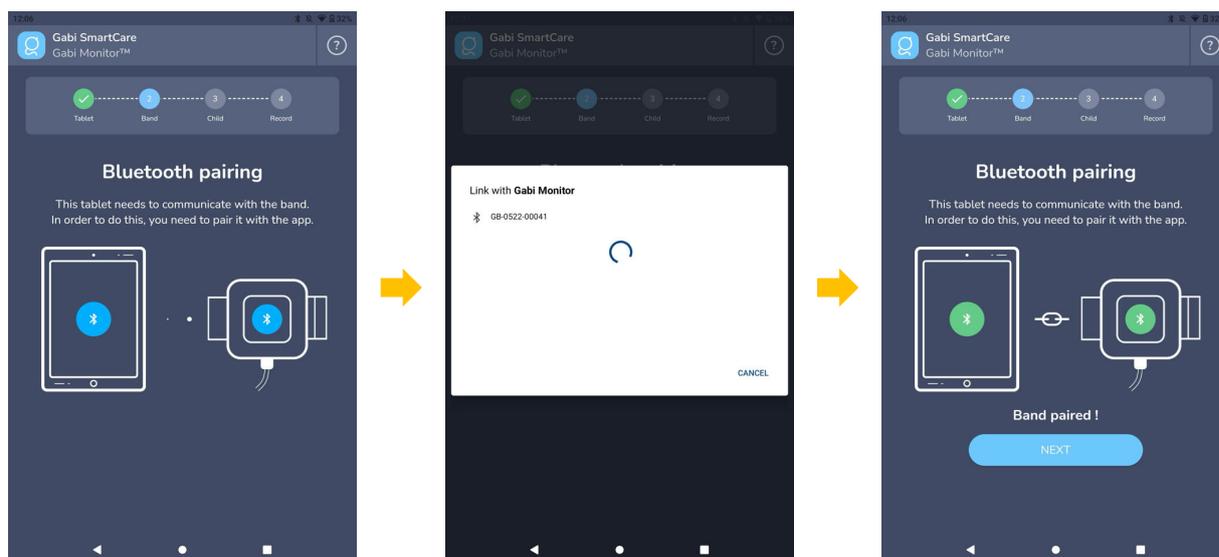


Figura 16: proceso de instalación de la Gabi Monitor App: emparejamiento de pantallas

- (16) Pulse el botón "NEXT" (SIGUIENTE). Para vincular el Gabi™ system creado por su médico al niño, necesita escanear el código QR que recibió de él. Tenga a mano el código QR en su computadora o impreso y escanéelo utilizando la cámara integrada de la Gabi™ Monitor Tablet (consulte A en la Figura 2 en la Página 14).

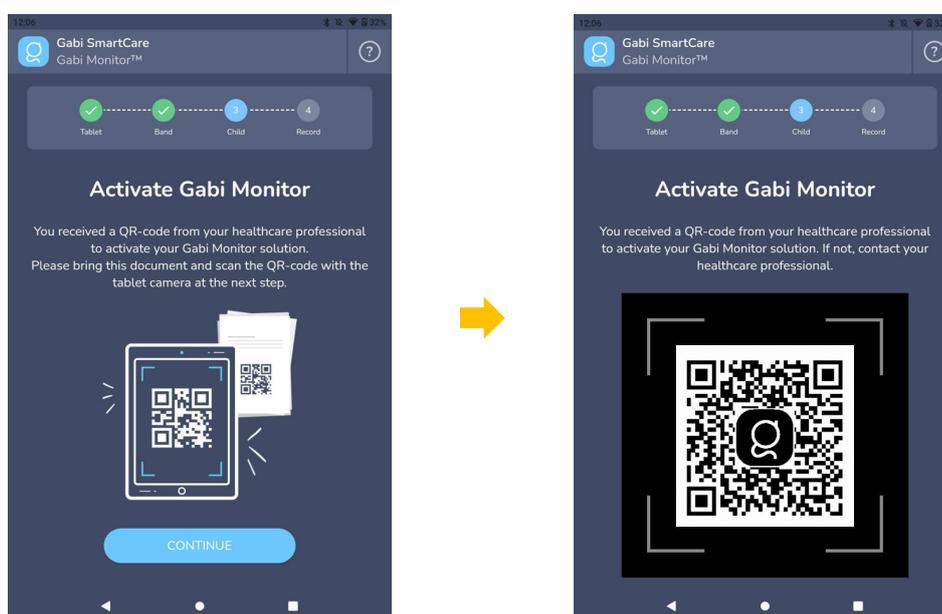


Figura 17: proceso de instalación de la Gabi Monitor App: código QR

- (17) La Gabi™ Monitor App le pide que confirme el nombre de su hijo. Si es el nombre de su hijo, pulse el botón "YES" (SÍ) y, una vez creada la cuenta, pulse el botón "NEXT" (SIGUIENTE). Si no es el nombre de pila de su hijo, pulse el botón "NO" y comuníquese con su médico. Si pulsó el botón "NO" por error, deberá reiniciar el proceso de configuración desde el Paso 2.

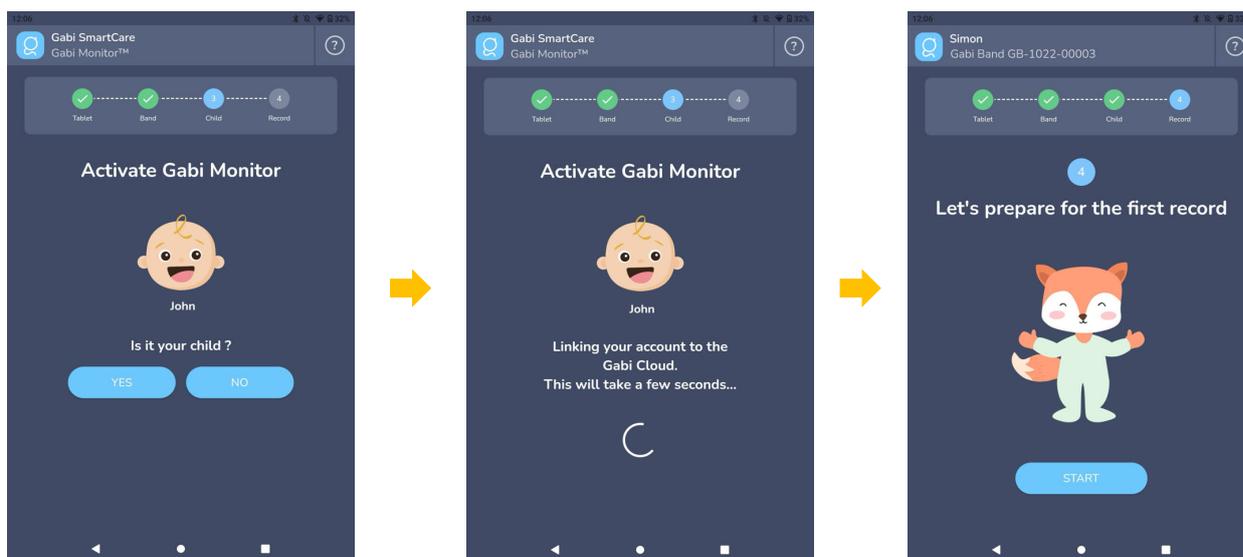


Figura 18: proceso de instalación de la Gabi Monitor App: conexión con el niño

- (18) La Gabi™ Monitor App le guiará para proceder a su primer registro. Para ello, su banda necesita tener un nivel de batería del 25 % como mínimo. Cuando se alcance ese nivel de batería, pulse el botón "CONTINUE" (CONTINUAR) y desenchufe la Gabi Band.

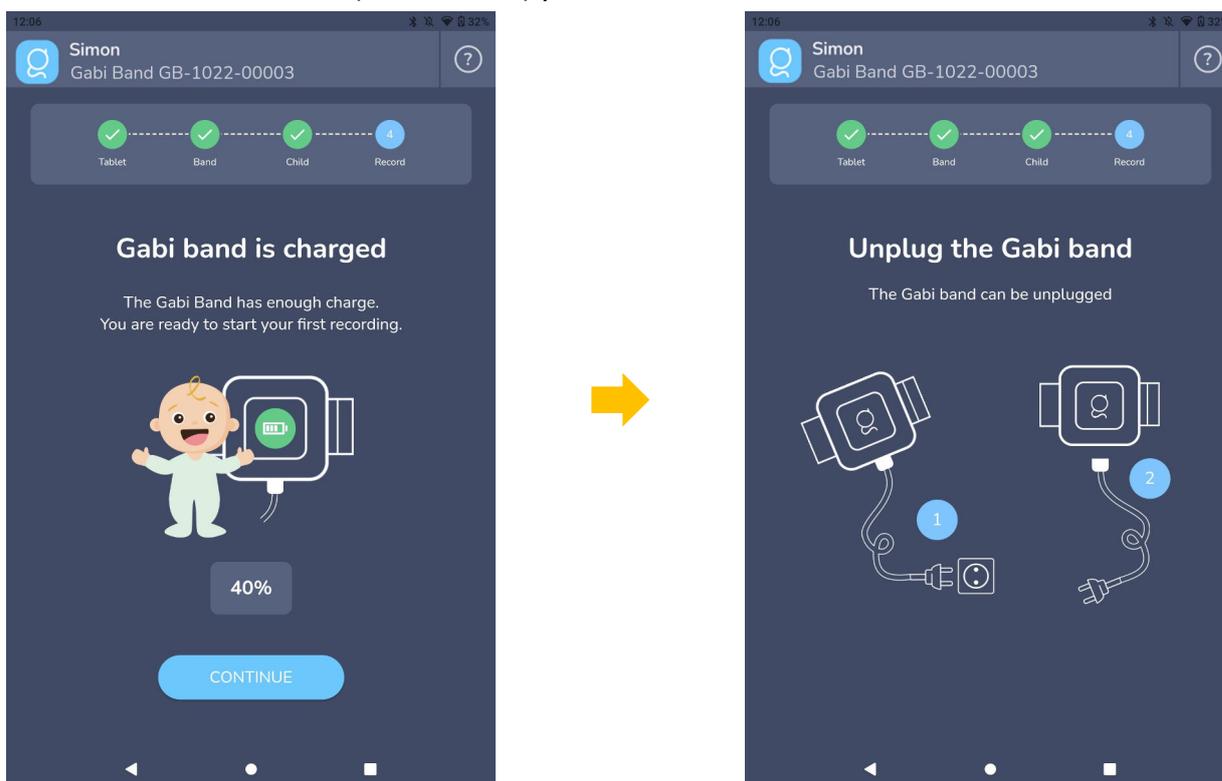


Figura 19: proceso de instalación de la Gabi Monitor App: batería y desconexión de la Gabi Band

- (19) La Gabi™ Monitor App explica cómo colocar correctamente la Gabi™ Band en el brazo del niño, con imágenes de ejemplos de instalaciones correctas e incorrectas. Después de leer atentamente las instrucciones, acepte la explicación. Ya está listo para empezar con su primer registro.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

Si tiene algún problema durante la configuración, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (consulte los datos de contacto en la Página 76).

	Pediarity™ Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	Versión L
		09 de enero de 2024

## 4.4 Uso de su Gabi™ system: instrucciones de funcionamiento

### 4.4.1 Antes de iniciar un registro

Cada vez que planifique un registro (por ejemplo, cuando su hijo esté a punto de dormirse/tomar una siesta), siga los pasos que se indican a continuación:

- (1) Desconecte la Gabi™ Band de su cable de carga.



Figura 20: Gabi Band y su cable de carga

- (2) Compruebe que las luces verde y roja de la parte inferior de la unidad del sensor parpadean, indicando así que la Gabi™ Band está lista para colocarse en el brazo del niño.

Las luces verde y roja parpadearán una vez cada 5 segundos hasta que la Gabi™ Band entre en contacto con la piel del niño.

Encontrará un resumen de las indicaciones luminosas de la Gabi™ Band en el Capítulo 9 (Indicaciones luminosas de la Gabi™ Band).



Figura 21: LED verde y rojo parpadeando

- (3) En los 5 minutos siguientes a la desconexión del cargador, coloque la Gabi™ Band en la parte superior del brazo de su hijo **en contacto con la piel, a medio camino entre el hombro y el codo**. Consulte la Figura 22 ci-dessous para la colocación correcta: el área verde de esta figura muestra el lugar de colocación adecuado.

⚠ La Gabi™ Band debe colocarse en contacto directo con la piel del niño, no encima de ninguna prenda.

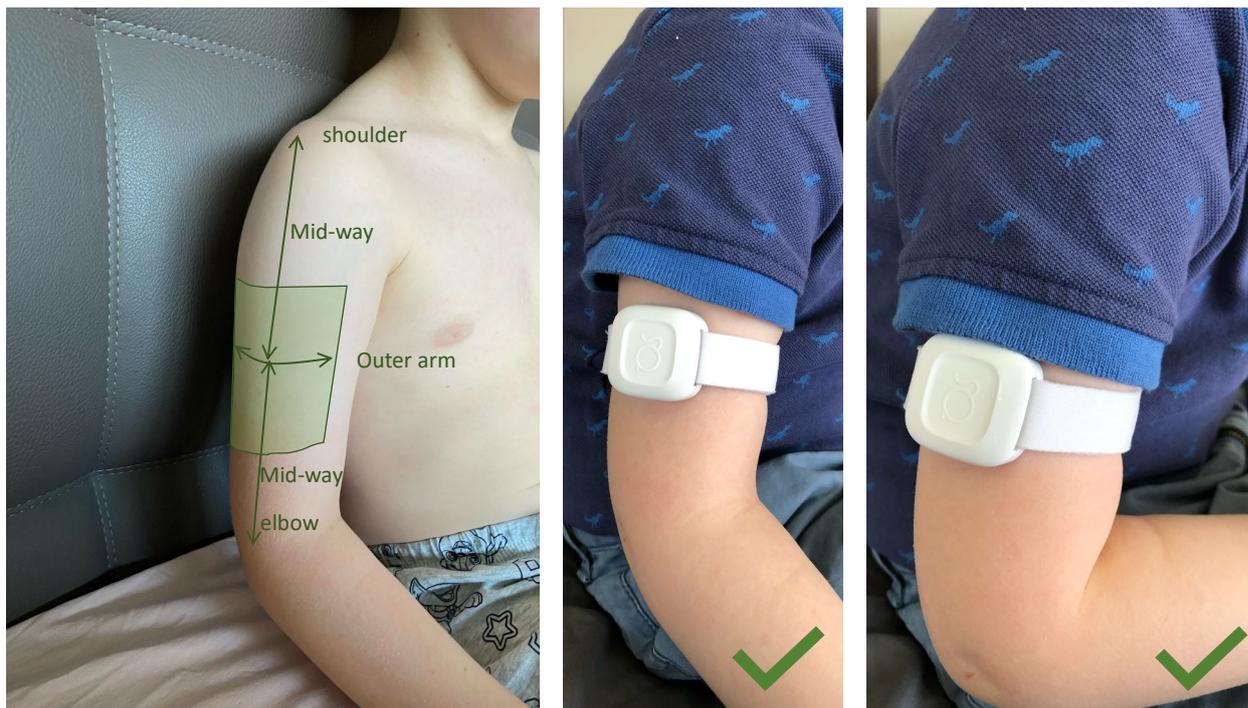


Figura 22: zona aceptable para la colocación del sensor

⚠ Si su hijo está usando ropa de manga larga, asegúrese de elegir una que no le apriete demasiado para dejar espacio para la Gabi™ Band bajo la manga con contacto directo con la piel.

- i. Coloque el brazaletes alrededor de la parte lateral del brazo del niño, y entre el hombro y el codo.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024



*Figura 23: Coloque el brazalete alrededor del brazo del niño (paso i)*

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

Revise cuidadosamente que:

- La Gabi™ Band se sitúe a medio camino entre el hombro y el codo.



Figura 24: ubicación incorrecta: no está entre el hombro y el codo

- La Gabi™ Band esté colocada en la parte lateral del brazo.



Figura 25: ubicación incorrecta: no está en la parte lateral del brazo

- La Gabi™ Band esté en contacto directo con la piel del niño.



Figura 26: ubicación incorrecta: no está en contacto directo con la piel

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

- ii. Coloque el extremo libre del brazaletes de la Gabi™ Band en el bucle de fijación de la Gabi™ Band.



*Figura 27: Extremo libre en el bucle de fijación (paso ii)*

- iii. Doble el extremo libre del brazaletes alrededor del bucle de fijación y tire suavemente del extremo hasta alcanzar el tamaño adecuado.

 El tamaño del brazaletes de la Gabi™ Band debe ajustarse de forma que no se mueva, pero sin que apriete demasiado.



*Figura 28: ajuste del tamaño del brazaletes (paso iii)*

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

- iv. Sujete la parte del gancho a la parte de tela del brazalete para abrocharlo. La Gabi™ Band debe estar firmemente sujeta al brazo. Cuando está bien fijada, el sensor tampoco puede girar sobre el brazo ni deslizarse hacia arriba y hacia abajo.



Figura 29: fijación del brazalete (paso iv)

 No apriete demasiado el brazalete y tenga cuidado de no pellizcar la piel de su hijo. La sangre de su hijo debe circular con normalidad.

Revise cuidadosamente que:

- El brazalete se aprieta lo suficiente para impedir que la Gabi™ Band se mueva o gire.



Figura 30: mal ajustado: no lo suficientemente apretado

- El brazalete no está lo suficientemente apretado, para permitir que la sangre circule con normalidad.

	<b>Pediarity™</b> Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	Versión L
		09 de enero de 2024



Figura 31: mal ajustado: demasiado apretado

- (4) Desbloquee la tablet
- (5) Si aún no lo ha hecho, abra la Gabi™ Monitor App en la tablet.
- (6) Compruebe que los 3 estados de la Gabi™ Band están en verde y pulse "Start recording" (Iniciar registro).

Si uno de los estados es rojo o naranja, consulte la Sección 8.2.

Una vez iniciado el registro, el estado cambia a "Recording in progress" (Registro en curso) y se mostrarán los parámetros fisiológicos medidos.

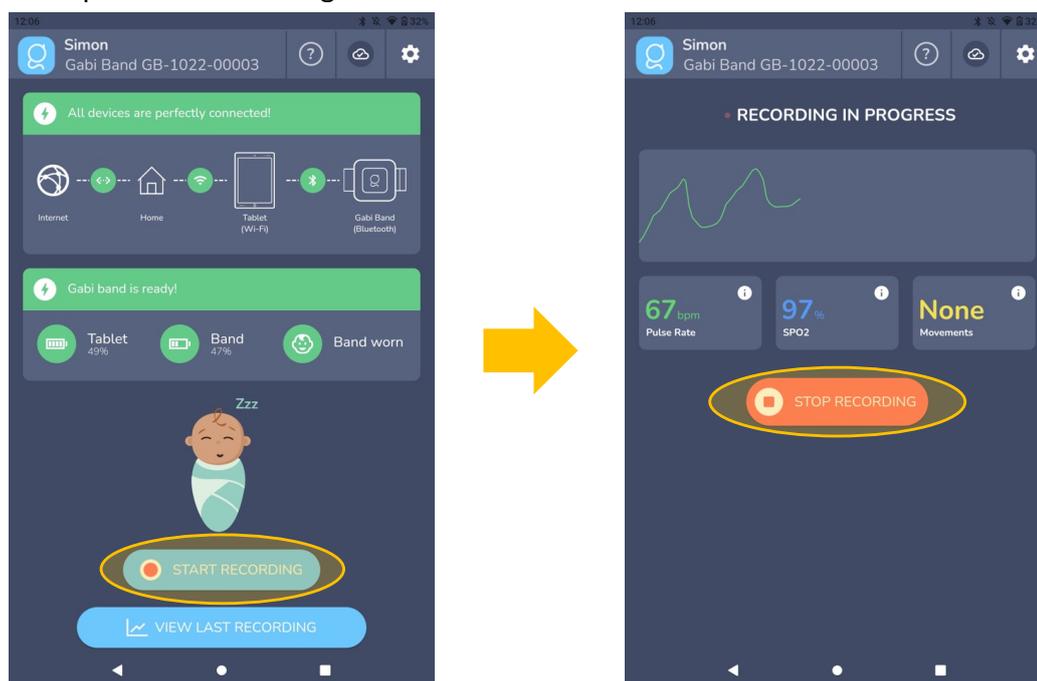


Figura 32: inicio del registro

- (7) Deje la tablet **a menos de 7 metros (23 pies) del niño** y manténgala fuera del alcance de todos los niños durante la registro para garantizar una correcta recopilación de datos.



No coloque la tablet en una posición que pueda provocar su caída sobre el niño.

- (8) Deje la **tablet conectada a la corriente** durante el registro.

	<b>Pediarity™</b> Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	Versión L
		09 de enero de 2024

#### 4.4.2 Al final del periodo de registro

Cuando quiera finalizar el registro (es decir, cuando su hijo se despierte), siga los pasos que se indican a continuación:

- (1) Desbloquee la tablet utilizando la contraseña definida.
- (2) Si aún no está abierta, abra la Gabi™ Monitor App.
- (3) Pulse "Stop recording" (Detener registro).

Una vez detenido el registro, el icono "Gabi Cloud" se cambia a "🌐", lo que indica que los datos registrados de Gabi se están enviando a Gabi Cloud para que su médico pueda visualizarlos de forma remota. Una vez enviados, el icono "Gabi Cloud" cambia a "☁️".

Si el icono "Gabi Cloud" cambia a un icono wifi tachado "🌐❌", consulte la Sección 8.2.5.

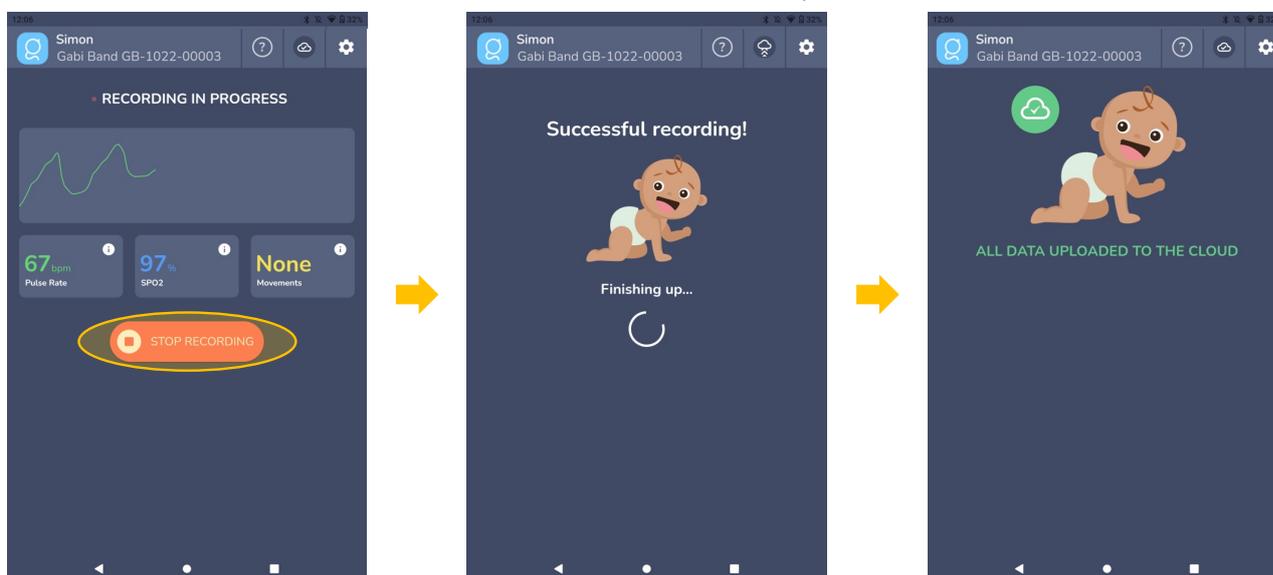


Figura 33: Detener el registro y cargar los datos

- (4) Retire la Gabi™ Band del brazo del niño. Tenga en cuenta que pueden aparecer ligeras marcas temporales después de llevar puesta la Gabi™ Band durante varias horas. Deberían desaparecer aproximadamente 10 minutos después de retirar el dispositivo.
- (5) Si el brazalete de la Gabi™ Band no está limpio, puede retirarlo del sensor de la Gabi™ Band y limpiarlo (consulte la Página 36, 4.5.1 "Limpieza de la Gabi™ Band").
- (6) Conecte la Gabi™ Band al cargador y colóquela fuera del alcance de los niños.

Una vez conectada al cargador, el icono de la batería cambia a "Battery charging" (Batería cargando). Una vez cargada por completo, el icono de la batería cambia a "Battery fully charged" (Batería totalmente cargada).

Incluso cuando esté completamente cargada, se recomienda encarecidamente dejar la Gabi™ Band conectada a la corriente mientras no se utilice para garantizar que estará suficientemente cargada para el siguiente registro.

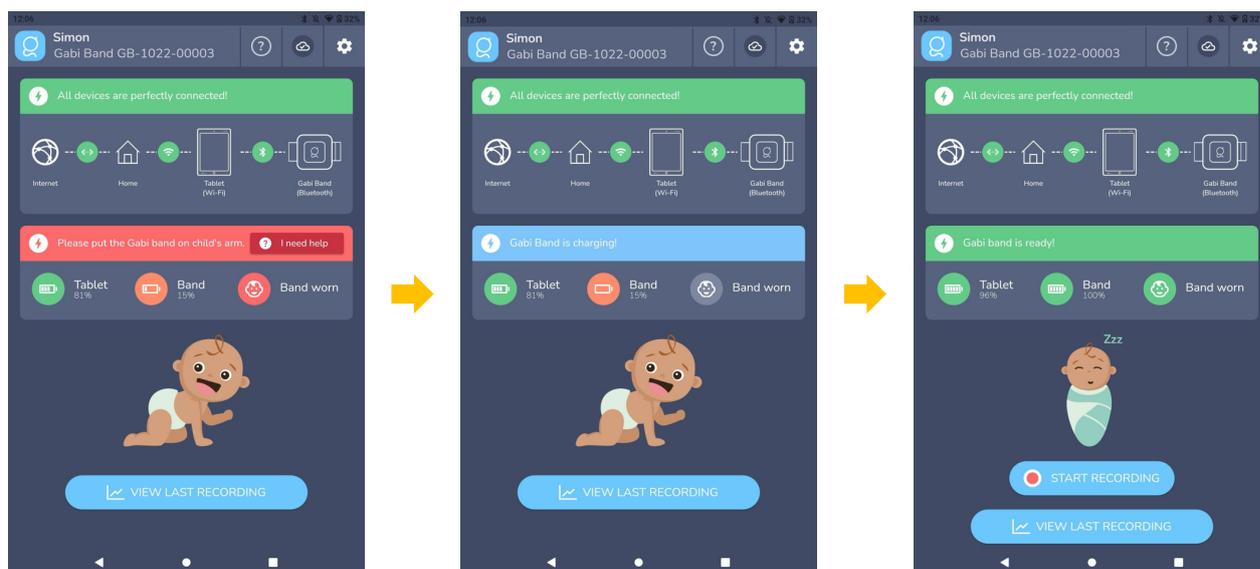


Figura 34: indicación del estado de la batería

Cuando no hay ningún registro en curso, puede hacer clic en "View Last Recording" (Ver último registro) para ver un resumen del último registro. Cuando termine, puede volver a la pantalla anterior pulsando la flecha hacia atrás de la barra superior.

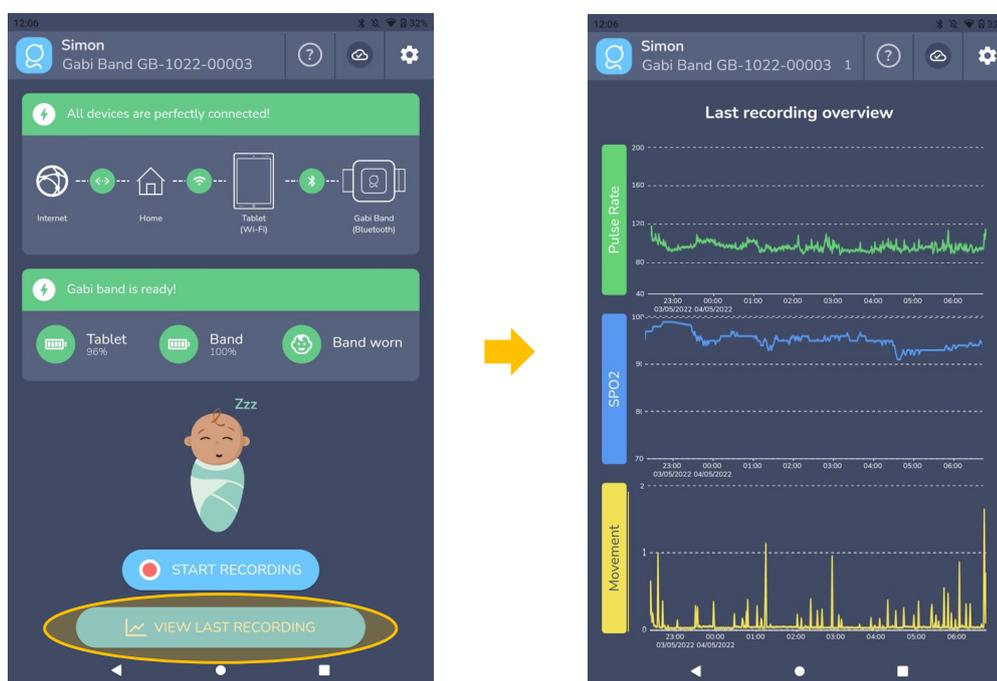


Figura 35: resumen del último registro

#### 4.5 Instrucciones de limpieza

Debe limpiar el aparato con frecuencia. La frecuencia de la limpieza queda a su discreción.

No utilice productos de limpieza cáusticos o abrasivos.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

 No sumerja la unidad de sensor de la Gabi™ Band en una solución líquida.

 No esterilice el Gabi™ system por irradiación, vapor o autoclave.

#### 4.5.1 Limpieza de la Gabi™ Band

Debe asegurarse de que la Gabi™ Band se mantenga en un entorno limpio.

Para limpiar la Gabi™ Band, desconéctela de la corriente y asegúrese de que no se aplica al niño.

La Gabi™ Band debe limpiarse suavemente con un paño húmedo y limpio.

Si el brazalete de la Gabi™ Band está sucio, desmóntelo de la unidad de sensor de la Gabi™ Band. Proceda a la limpieza del elemento textil: puedes lavarlo en una lavadora a una temperatura máxima de 30 °C (86 °F) y a una velocidad máxima de centrifugado de 800 rpm. No lo seque en secadora.

Cuando esté completamente seco, vuelva a unir con cuidado el extremo del bucle del brazalete a las dos protuberancias de la unidad de sensor de la Gabi™ Band (consulte el Capítulo 4.3.1 en la Página 17).

#### 4.5.2 Limpieza de la Gabi™ Monitor Tablet

Debe asegurarse de que la Gabi™ Monitor Tablet se mantenga en un entorno limpio.

En caso de ser necesario, la Gabi™ Monitor Tablet puede limpiarse con cuidado con un paño seco y limpio.

## 4.6 Instrucciones de almacenamiento

Guarde el Gabi™ system fuera del alcance de los niños.

No lo exponga a la luz directa del sol.

Deben respetarse las siguientes condiciones de almacenamiento:

- Rango de temperaturas: -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
- Rango de humedad: 15 % a 90 %
- Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

En caso de un almacenamiento prolongado (más de tres meses sin uso), le recomendamos que siga estas condiciones restringidas:

- Rango de temperaturas: 10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F)

Después de un almacenamiento muy prolongado (más de un año sin cargar), la capacidad de la batería podría reducirse.

## 4.7 Mantenimiento

Su Gabi™ system no requiere ningún mantenimiento específico.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

## 5. Uso de la Gabi™ Monitor App: características adicionales

### 5.1 Menú de ajustes

La pestaña de ajustes (  consulte el botón E en la Figura 3 de la Página 15) le permite realizar acciones y acceder a los ajustes de la Gabi™ Monitor Tablet.

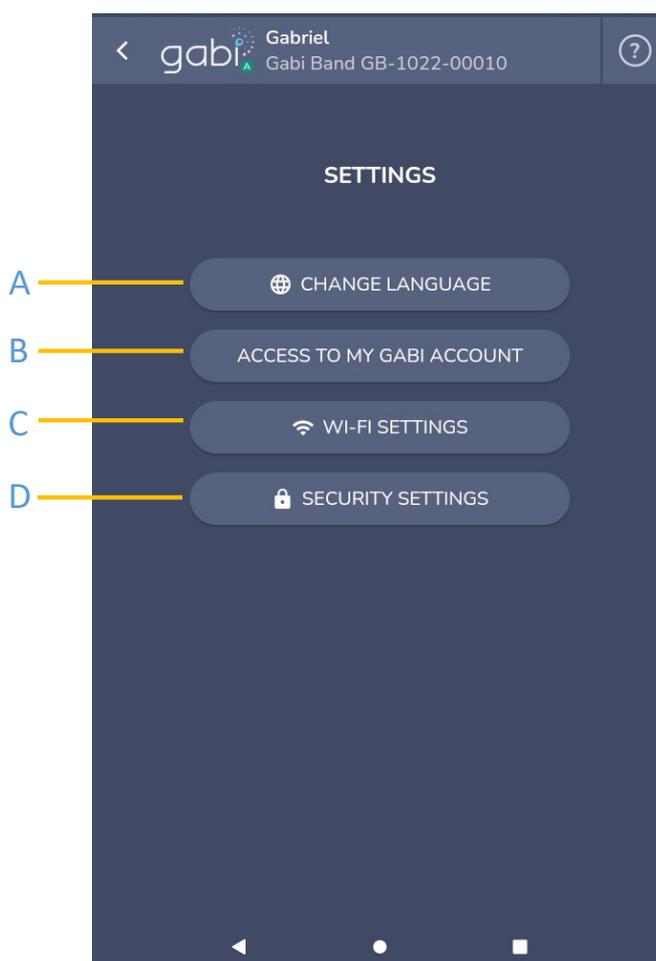


Figura 36: pantalla de configuración de la Gabi Monitor App

- A. Elegir otro idioma para su interfaz. Haga clic en el botón "change" (cambiar) y seleccione el nuevo idioma. La Gabi™ Monitor App cambia automáticamente a este nuevo idioma.
- B. Acceder a sus datos personales, modificarlos o eliminarlos. Puede pulsar este botón si desea acceder a sus datos personales o modificarlos (consulte la Sección 5.1.1 Acceder a sus datos personales y modificarlos en la Página 38) o si desea eliminar su cuenta (consulte la Sección 0 Eliminar su cuenta en la Página 40).
- C. Acceder a los ajustes de wifi (consulte la Sección 5.1.2 Utilizar una nueva red wifi en la Página 41)
- D. Acceder a los ajustes de la pantalla de bloqueo (consulte la Sección 5.1.3 Defina o cambie su pin para desbloquear la Gabi™ Monitor Tablet en la Página 41)

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

### 5.1.1 Acceder a sus datos personales y modificarlos o eliminar su cuenta

Si desea verificar o actualizar sus datos personales o eliminar su cuenta, pulse el botón "access, modify or delete my personal data" (acceder, modificar o eliminar mis datos personales) (consulte D en la Figura 36 de la Página 37). Recibirá un correo electrónico con un enlace para acceder a sus datos personales (el título del correo electrónico es "Gabi: access to personal data" (Gabi: acceso a los datos personales)). En la pantalla de confirmación, puede comprobar la dirección de correo electrónico en la que recibirá el enlace.

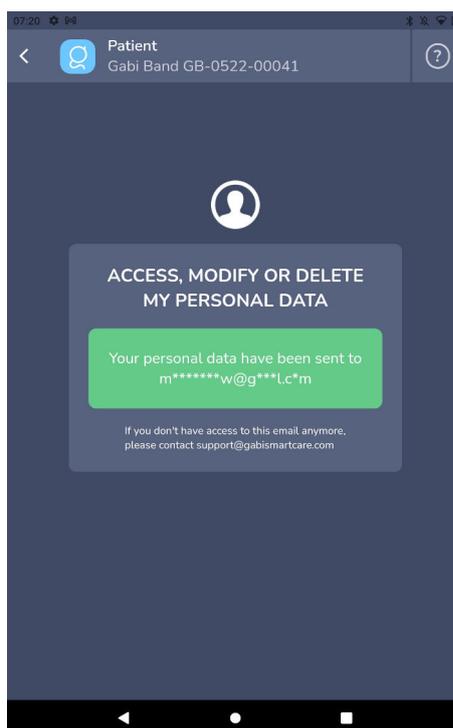


Figura 37: acceso a los datos personales: correo electrónico de confirmación

Abra su correo electrónico y haga clic en el enlace incluido (que es algo así como <https://privacy.gabismartcare.com/xxx>).

Esto abre la página de Privacidad en su navegador web.

Tenga en cuenta que algunos navegadores pueden no ser compatibles. Si tiene dificultades para visualizar la página, compruebe la versión de su navegador. Los navegadores y versiones compatibles son:

- Chrome v80 igual o superior
- Safari v13 igual o superior
- Firefox v80 igual o superior
- Opera v70 igual o superior
- Edge v80 igual o superior

Observación: Internet Explorer no es compatible.

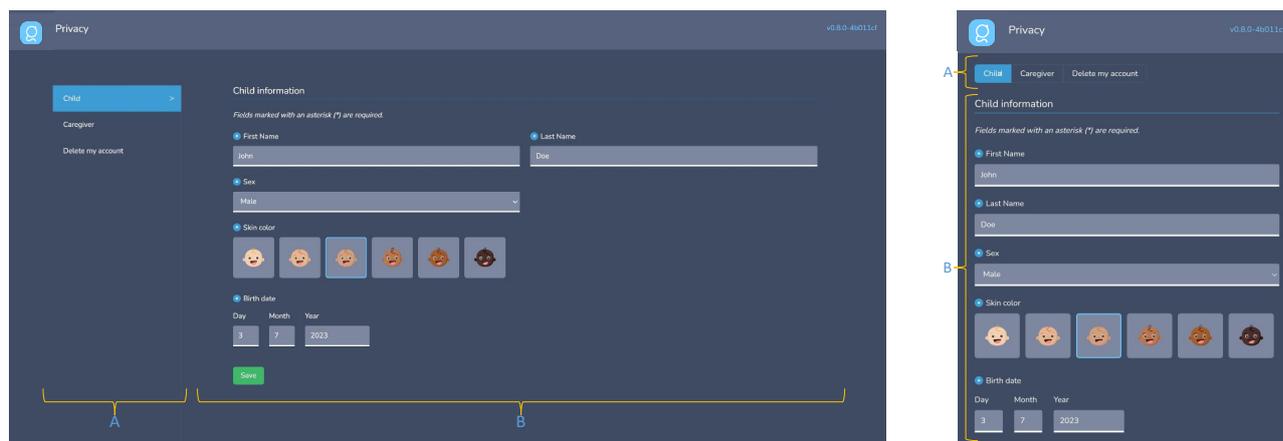


Figura 38: Página de privacidad en distintos tipos de pantalla

En la página de privacidad hay tres pestañas (A): información del niño, información del cuidador y la acción eliminar mi cuenta. Puede navegar por estas tres hojas con la barra izquierda de la página.

En cada hoja, puede actualizar la información o realizar acciones (B).

### Información del niño

En la hoja de información del niño, puede actualizar los diferentes campos:

- Nombre del niño (*campo de texto*)
- Apellido del niño (*campo de texto*)
- Sexo del niño (*desplegable*)
- Color de piel del niño según la escala Fitzpatrick<sup>2</sup> (*selección*)
- Fecha de nacimiento del niño (*selección de calendario*): en el calendario, seleccione primero el año y el mes y, a continuación, puede seleccionar el día.
- De ser necesario, confirmación de que utilizará el dispositivo bajo su propia responsabilidad cuando lo utilice fuera del uso previsto (por ejemplo, para niños mayores de 12 años o menores de 28 días) (*casilla de selección*)



El Gabi™ system está destinado a lactantes y niños de hasta 12 años de edad.

Tenga en cuenta que si abandona el formulario antes de pulsar el botón "save" (guardar), se perderán los datos ya actualizados.

<sup>2</sup> Tipo I: siempre se quema, nunca se broncea. Estas personas tienen la piel blanca y pálida, el pelo rubio o pelirrojo, los ojos azules y pecas.

Tipo II: suele quemarse y broncearse, pero poco. Estas personas tienen la piel blanca, el pelo rubio o pelirrojo, los ojos azules o verdes.

Tipo III: se broncea después de una quemadura inicial, luego se broncea bien. Tono de piel crema y ojos azules, verdes o marrones.

Tipo IV: se broncea bien. Tono de piel marrón claro, ojos generalmente marrones.

Tipo V: raramente se quema. Tiene un tono de piel marrón oscuro y ojos marrones.

Tipo VI: nunca se quema. Piel profundamente pigmentada con el tono más oscuro.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

### Información del cuidador

En la hoja de información del cuidador, puede actualizar los distintos campos:

- Nombre del cuidador (*campo de texto*)
- Apellido del cuidador (*campo de texto*)
- Idioma de preferencia del cuidador (*desplegable*): el idioma definido aquí se utilizará para la interfaz de usuario de la Gabi™ Monitor App.
- Dirección de correo electrónico del cuidador (*campo de texto*): esta dirección de correo electrónico se utiliza para enviar el código QR al cuidador y acceder a los datos personales
- Número de teléfono del cuidador (*desplegable para el campo país y número*): puede definir el país del cuidador haciendo clic en la bandera y, a continuación, escribir su número de teléfono

Tenga en cuenta que si abandona el formulario antes de pulsar el botón "next" (siguiente), se perderán los datos ya actualizados.

### Eliminar su cuenta

Al eliminar su cuenta, perderá su acceso a la Gabi™ Monitor App. Se eliminarán todos sus datos personales, lo que significa que su médico perderá el acceso a sus registros de biometría. Se trata de una acción irreversible. Una vez hecho esto, los registros anteriores se pierden y no se pueden recuperar. Si desea utilizar su Gabi™ system después de la eliminación, deberá pedir a su médico que le cree una nueva cuenta. Su historial anterior no estará disponible.

Si desea continuar, abra la página "delete my account" (eliminar mi cuenta). Escriba, en mayúsculas, "DELETE" (ELIMINAR) en el campo correspondiente. Una vez hecho esto, aparecerá un campo en el que podrá ingresar el motivo de la eliminación de su cuenta (es decir, la baja). Ahora puede pulsar el botón "delete my account" (eliminar mi cuenta). Un mensaje emergente de confirmación le pedirá que confirme definitivamente su elección.

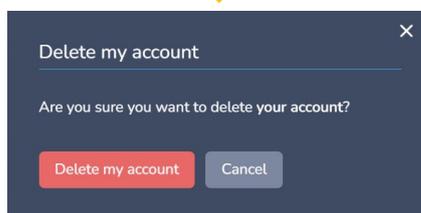
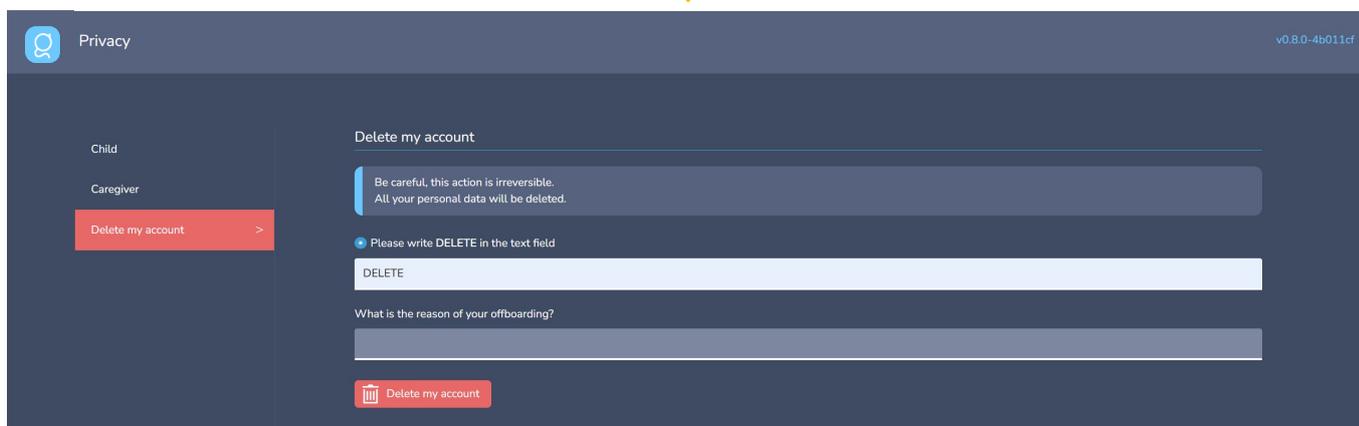


Figura 39: eliminación de la cuenta: pasos

### 5.1.2 Utilizar una nueva red wifi

Si desea utilizar otra red wifi o si ha actualizado su contraseña wifi, pulse el botón "Wi-Fi settings" (Ajustes de wifi) de la pantalla de ajustes (consulte E en la Figura 36 de la Página 37).

### 5.1.3 Defina o cambie su pin para desbloquear la Gabi™ Monitor Tablet

Si desea definir o cambiar el pin utilizado para bloquear la pantalla de su Gabi™ Monitor Tablet, pulse el botón "Security settings" (Ajustes de seguridad) de la pantalla de ajustes (consulte G en la Figura 36 de la Página 37). Primero deberá ingresar su pin actual y después podrá ingresar su nuevo pin.

## 5.2 Menú de ayuda

El menú de ayuda le ofrece información para facilitar el uso del Gabi™ system.

	PEDIARITY™ Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	Versión L
		09 de enero de 2024



Figura 40: menú de ayuda

- A. Cómo colocar la banda
- B. Acceso a las instrucciones de uso electrónicas (este manual en versión pdf)
- C. Menciones legales
- D. Acceso al menú de resolución de problemas

### 5.2.1 Cómo colocar la banda

Puede acceder a las instrucciones para colocarle correctamente la Gabi™ Band a su hijo, incluidas imágenes de "lo que se debe y lo que no se debe hacer". También puede encontrar estas instrucciones en la sección 4.4.1 en la Página 27).

### 5.2.2 Instrucciones de uso

Puede acceder a este manual de instrucciones de uso en formato electrónico. La última versión de este manual, así como la guía de configuración rápida, están disponibles en [help.gabismartcare.com/#monitor-documents](http://help.gabismartcare.com/#monitor-documents). Puede acceder directamente a la versión del manual correspondiente a su aplicación escaneando el código QR, copiando la URL o enviando la URL a su dirección de correo electrónico (definida en su cuenta de Gabi).

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

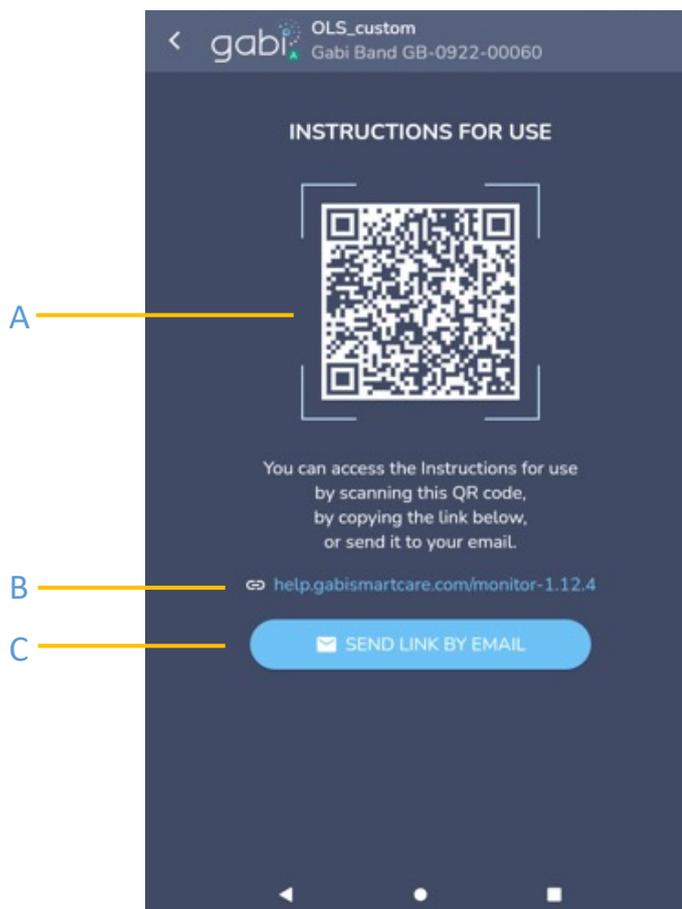


Figura 41: acceso a las instrucciones de uso

- A. Código QR para acceder a las instrucciones de uso
- B. URL para copiar en su navegador web
- C. Botón para enviar la URL a la dirección de correo electrónico definida en su cuenta de Gabi

### 5.2.3 Menciones legales

En el menú de menciones legales, puede encontrar la siguiente información:

- Nombre de la aplicación
- Versión de la aplicación (LOT)
- UDI de la aplicación
- Fabricante de la aplicación
- Símbolos aplicables a esta aplicación

## 5.2.4 Resolución de problemas



Figura 42: menú de resolución de problemas

- A. número de versión de la Gabi™ Monitor App:
- B. Información de la Gabi™ Band, incluyendo
  - Número de serie de la Gabi™ Band
  - Estado de la Gabi™ Band:
    - i. Conectada puesta
    - ii. Conectada en espera
    - iii. Conectada cargando
    - iv. Banda conectada totalmente cargada
    - v. No conectada

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

- Nivel de batería de la Gabi™ Band
  - Versión del firmware instalado en la Gabi™ Band
- C. Estado de conectividad (V verde si la conexión es correcta, X roja si la conexión no es correcta)
- Entre el router doméstico e Internet
  - Entre la tablet y el router doméstico
- D. Esta advertencia debe leerse atentamente.
- E. Enviar registros a Gabi SmartCare (puede ser útil durante la resolución de problemas o al ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar asistencia)
- F. Buscar actualizaciones de la aplicación
- G. Forzar la actualización del firmware en la Gabi™ Band (consulte la Sección 0 Gabi™ Band Actualización del firmware de la en la Página 46)
- H. Acceso a los ajustes de Bluetooth de la Gabi™ Monitor Tablet
- I. Restablecer la aplicación
- J. Restablecer la banda a los valores de fábrica

#### *Gabi™ Monitor App Actualización de la*

Gabi SmartCare publica de forma frecuente nuevas versiones de la Gabi™ Monitor App.

Si la nueva versión resuelve un problema importante, deberá instalar esta nueva versión en su dispositivo. No podrá iniciar un nuevo registro sin esta nueva versión. Pulse el botón "update now" (actualizar ahora) para continuar.

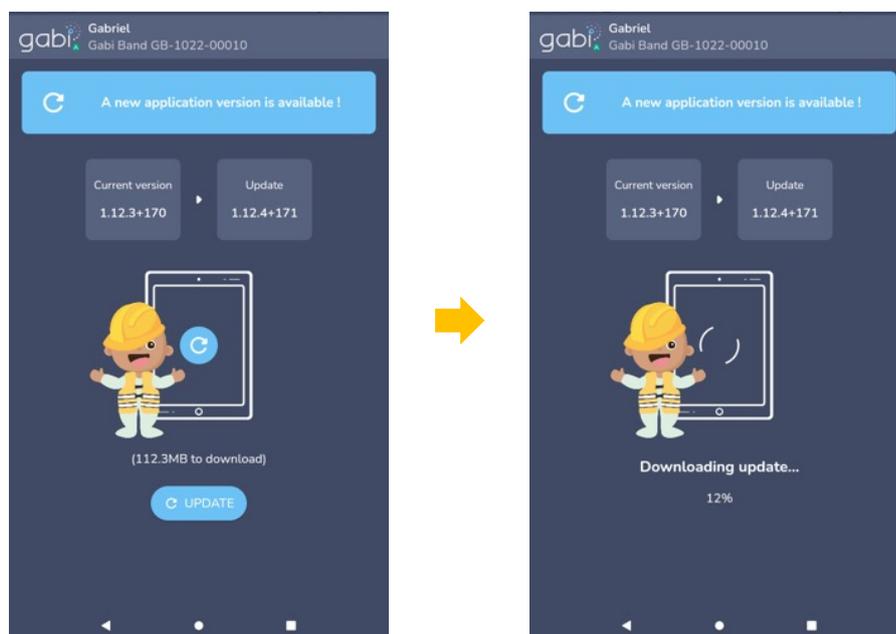


Figura 43: Nueva versión: actualización obligatoria de la aplicación

En otros casos, la nueva versión puede instalarse en su dispositivo, pero no es obligatorio. Para instalar una nueva versión, pulse el botón "check for updates" (buscar actualizaciones) desde la pantalla de resolución de problemas (consulte F en la Figura 42 de la Página 44).

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

El sistema comprobará si hay una nueva versión disponible y, en ese caso, le propondrá que proceda a la actualización de la versión. Pulse el botón "update" (actualizar) para continuar.

Si la actualización es opcional u obligatoria, se descargará la nueva versión. Cuando termine la descarga, pulse el botón "install" (instalar). Una vez finalizada la instalación, puede abrir la nueva versión pulsando el botón "open" (abrir).

#### *Gabi™ Band Actualización del firmware de la*

Cuando se instala una nueva versión de la Gabi™ Monitor App, a veces incluye una nueva versión del firmware presente en su Gabi™ Band. En este caso, no podrá iniciar un nuevo registro sin esta nueva versión.

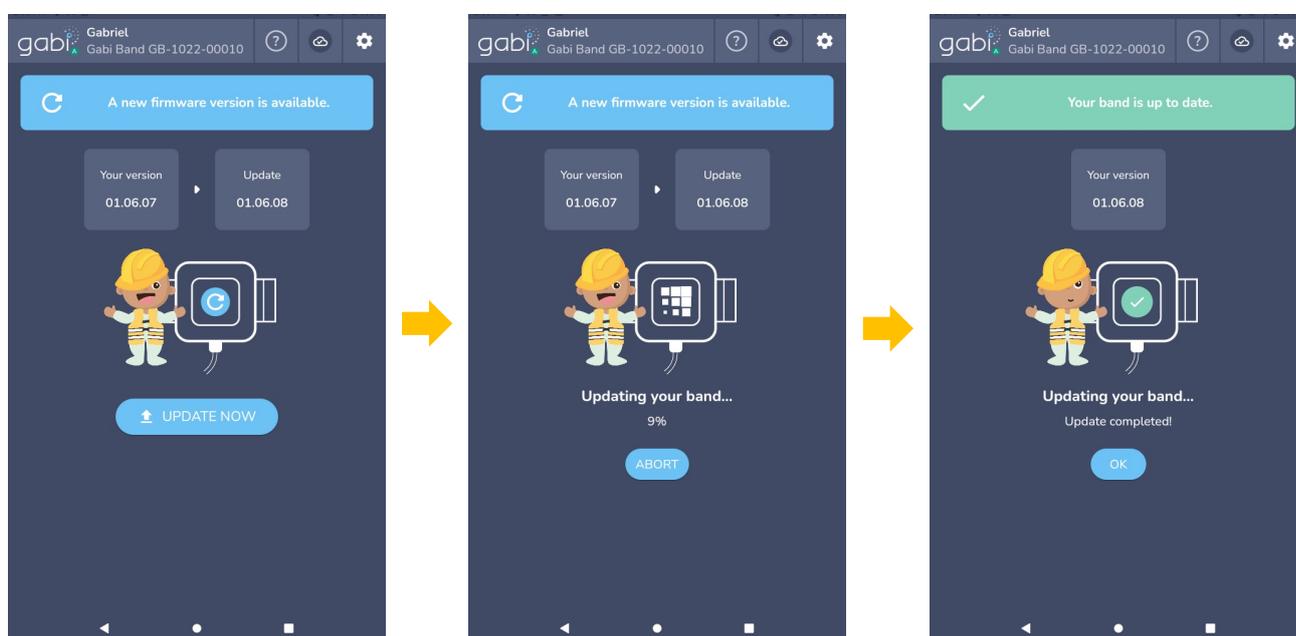


Figura 44: Actualización del firmware: pasos

Para actualizar el firmware, conecte primero la Gabi™ Band a su adaptador de corriente y, a continuación, pulse el botón "update now" (actualizar ahora). Durante la actualización:

- no apague la tablet
- mantenga la tablet muy cerca de la Gabi™ Band
- mantenga la Gabi™ Band conectada a la corriente

Una vez realizada la actualización, confirme la instalación. Ahora podrá utilizar su Gabi™ system como antes.

#### *Restablecer los ajustes de la aplicación*

Restablecer los ajustes iniciales de la Gabi™ Monitor App significa que se borrará el emparejamiento entre la Gabi™ Band y la Gabi™ Monitor Tablet, y que se perderá el vínculo entre su hijo y la Gabi™ Monitor App. Los registros realizados anteriormente seguirán estando a disposición de su médico. Si desea utilizar su Gabi™ system después del restablecimiento, deberá pedir a su médico que cree un nuevo código QR para usted.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

Si desea continuar, pulse el botón "Reset the App" (Restablecer la aplicación) de la pantalla de ajustes (consulte J en la Figura 36 de la Página 37).

Tenga en cuenta que los ajustes de wifi y de bloqueo de pantalla no se verán afectados por esta operación.

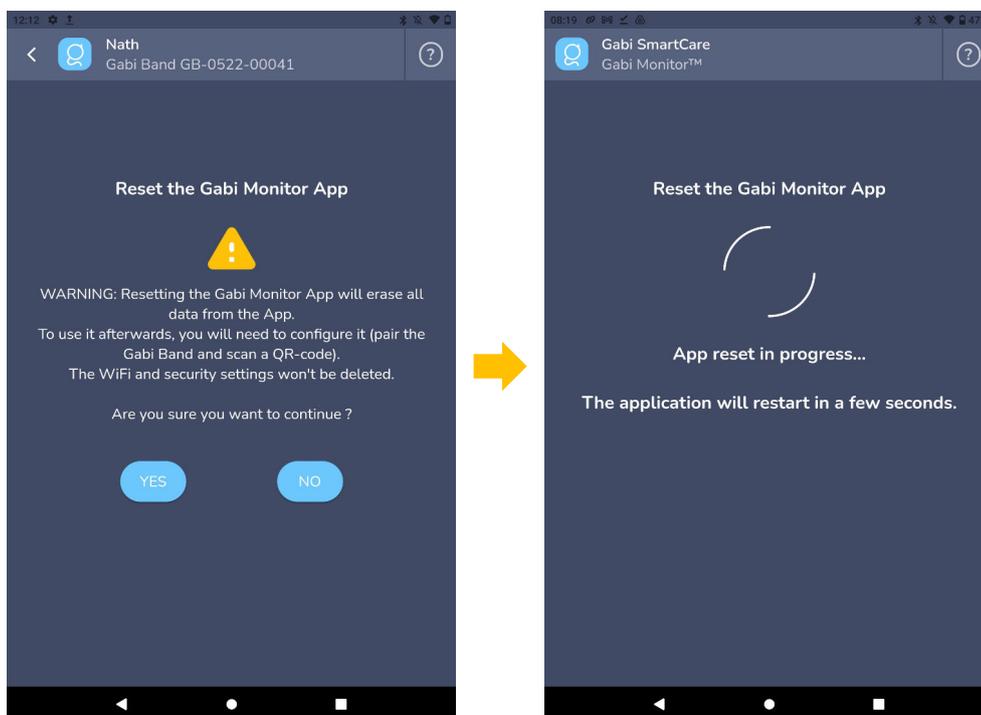


Figura 45: Restablecer los ajustes de la aplicación

### Restablecer la banda a los valores de fábrica

Esta operación restablece su Gabi™ Band a los valores de fábrica. No podrá utilizarla después sin el apoyo del servicio de atención al cliente de Gabi. No realice esta operación si no ha sido instruido y apoyado por el servicio de atención al cliente.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

## 6. Fin del uso: cómo desechar su Gabi™ system

Tanto la Gabi™ Band como la Gabi™ Monitor Tablet contienen una batería interna. Deseche los dispositivos conforme a los requisitos nacionales o regionales.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

## 7. Especificaciones técnicas

### 7.1 Especificaciones de funcionamiento

La Gabi™ Band puede funcionar con seguridad en el siguiente entorno:

- Rango de temperatura de funcionamiento: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
- Rango de humedad: 15 % a 90 %
- Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Después de 500 ciclos de carga y descarga de la batería, su rendimiento puede verse reducido.

### 7.2 Especificaciones del equipo

Conforme a los estándares IEC 60601-1 e ISO 80601-2-61, los atributos de rendimiento esenciales del Gabi™ system

incluyen:

- Indicación de la frecuencia de pulso
- Indicación de la SpO2

En caso de alteraciones electromagnéticas (EM) en la comunicación BLE entre la Gabi™ Band y la Gabi™ Monitor Tablet, la Gabi™ Monitor App puede dejar de mostrar valores al operador. Las alteraciones electromagnéticas no provocan valores erróneos en la Gabi™ Monitor App. Durante una alteración EM, la Gabi™ Band seguirá registrando los parámetros fisiológicos del niño. Cuando cese la alteración EM, la Gabi™ Monitor App se reconectará automáticamente a la Gabi™ Band y continuará con su funcionamiento normal.

#### 7.2.1 Alcance y precisión de la biometría

Tabla 2: alcance y precisión de la biometría

<u>Parámetro</u>	<u>Valor mínimo</u>	<u>Valor máximo</u>	<u>Precisión (ARMS)</u>
<b>SpO<sub>2</sub></b>	70 %	100 %	2.95 %
<b>Frecuencia de pulso</b>	25 lpm <sup>3</sup>	250 lpm	0.65 lpm
<b>Movimientos</b>	"Ninguno"	"Alto"	/

Tabla 3: RMSE detallado por rango de PR

<u>Rango de PR</u>	<u>25 a</u>	<u>100 a</u>	<u>175 a</u>
	<u>100</u>	<u>175</u>	<u>250</u>
<b>RMSE (lpm)</b>	0.33	0.79	0.71

<sup>3</sup> lpm (latidos por minuto)

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

Tabla 4: RMSE detallado por rango de SpO2 (Gabi Band n.º 1)

SpO2	Rango de			
	70 a 80	80 a 90	90 a 100	70 a 100
<b>RMSE (%)<sup>4</sup></b>				
<b>Todos los sujetos</b>	2.42	2.62	2.77	2.61
<b>Mujer</b>	2.61	1.74	2.09	1.99
<b>Hombre</b>	3.32	3.57	3.50	3.46
<b>Pigmentación media</b>	3.17	2.74	3.11	3.00
<b>Pigmentación oscura</b>	1.91	1.68	2.45	2.06

Tabla 5: RMSE detallado por rango de SpO2 (Gabi Band n.º 2)

SpO2	Rango de			
	70 a 80	80 a 90	90 a 100	70 a 100
<b>RMSE (%)<sup>5</sup></b>				
<b>Todos los sujetos</b>	2.60	1.74	3.15	2.59
<b>Mujer</b>	2.65	1.51	3.24	2.55
<b>Hombre</b>	2.54	2.23	3.01	2.66
<b>Pigmentación media</b>	2.93	1.32	2.75	2.41
<b>Pigmentación oscura</b>	1.62	2.12	3.76	2.60

Se ha validado la precisión de la medición de la frecuencia de pulso mediante el Gabi™ system para el rango de 25 a 250 lpm en pruebas de banco frente a un Whaleteq AECG100 con simulador PPG-1R-525.

La medición de la SpO2 del Gabi™ system se ha validado en voluntarios adultos sanos de ambos sexos con pigmentación de piel clara a oscura en estudios de hipoxia inducida en el rango de 70 a 100 % de SpO2 frente a un cooxímetro de laboratorio. El estudio clínico cumple el estándar ISO 14155:2011.

<sup>4,5</sup> RMSE = raíz de error cuadrado medio. Este valor se calculó eliminando dos sujetos con un índice de perfusión significativamente bajo que mostraban valores atípicos. El sistema Pediarity™ está pensado para pacientes correctamente perfundidos.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

El tiempo de promediación de datos para el parámetro SpO2 es de 20 segundos.

A continuación se muestran los gráficos de todos los puntos de datos muestreados para el estudio clínico de SpO2, incluidos los sujetos 8 y 12 que se han eliminado de las tablas 3 y 4 debido a un índice de perfusión demasiado bajo:

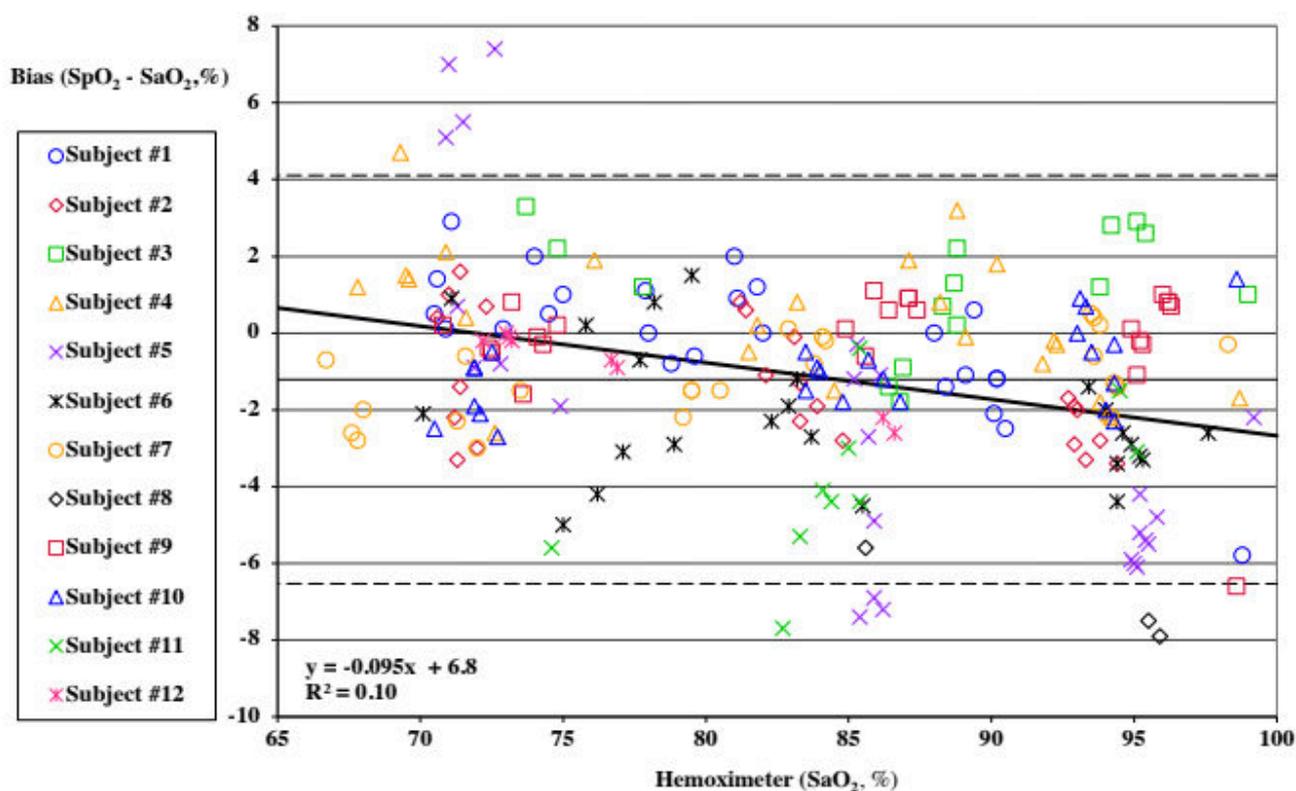
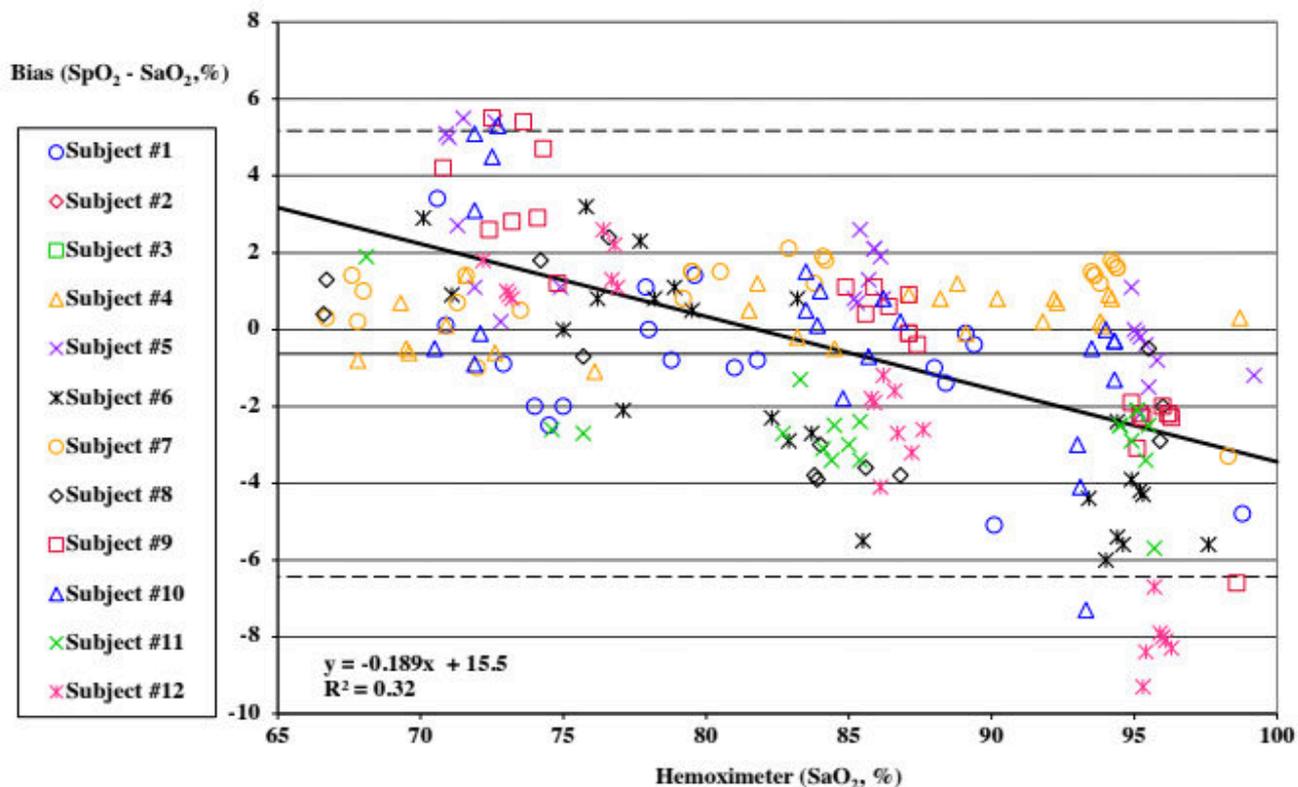


Figura 46: Puntos de datos muestreados durante el estudio de SpO2 (Gabi Band n.º 1 y 2)

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

 Dado que las mediciones de SpO2 de los equipos se distribuyen estadísticamente, solo cabe esperar que aproximadamente dos tercios de las mediciones de los equipos se sitúen dentro de  $\pm$ ARMS del valor medido por el equipo de referencia en el estudio clínico.

 No se puede utilizar un comprobador de funcionamiento para evaluar la precisión del Gabi™ system.

### 7.2.2 Longitudes de onda pico utilizadas

LED infrarrojo: 950 nm

LED rojo: 660 nm

LED verde: 526 nm

### 7.2.3 Especificaciones de recepción y transmisión

Interfaz inalámbrica de la Gabi™ Band (modo BLE)

Frecuencia: 2402 MHz a 2480 MHz

Modulación: GFSK

Potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) máxima: 8.44 dBm

Frecuencia wifi de la Gabi™ Monitor Tablet: 2.4 GHz a 802.11 b/g/n: 2412 a 2472 MHz

Frecuencia Bluetooth de la Gabi™ Monitor Tablet: 2402 a 2480 MHz

Potencia de salida máxima: -0.956 dBm

### 7.2.4 Pantalla

Velocidad de actualización de la pantalla: 1 segundo

## 7.3 Sistema eléctrico

### 7.3.1 Potencia

*Fuente de alimentación para la Gabi™ Monitor Tablet*

Entrada del adaptador de corriente alterna: 100 a 240 V, 50 a 60 Hz, 0.4 A

Salida del adaptador de corriente alterna: 5 V, 2 A

Nota: Utilice únicamente el adaptador de corriente CA/CC suministrado de la Gabi™ Monitor Tablet

- Para su uso en Norteamérica, el número de modelo del adaptador de corriente es FX2U-050200U
- Para su uso en la Unión Europea, el número de modelo del adaptador de corriente es WRP2E-050200U

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

### Fuente de alimentación para la Gabi™ Band

Entrada del adaptador de corriente alterna: 100 a 240 V, 50 a 60 Hz, 0.2 A

Nota: Utilice únicamente el adaptador de corriente de la Gabi™ Band

- Para su uso en Norteamérica, el número de modelo del adaptador de corriente es SK12G-0500100U
- Para su uso en la Unión Europea, el número de modelo del adaptador de corriente es SK12G-0500100V

### 7.3.2 Batería

#### Batería de la Gabi™ Monitor Tablet

Tipo: batería recargable de iones de litio

Capacidad: 3000 mAh

Tiempo de carga: <2 horas (tiempo para alcanzar el 80 % de capacidad a 25 °C/77 °F)

Tiempo de descarga: >18 horas en uso continuo normal

#### Batería de la Gabi™ Band

Tipo: batería recargable de iones de litio

Capacidad: 115 mAh

Tiempo de carga: <2 horas (tiempo para alcanzar el 80 % de capacidad a 25 °C/77 °F)

Tiempo de descarga: >18 horas en uso continuo normal

## 7.4 Características físicas

#### Gabi™ Monitor Tablet

Dimensiones: 185 mm x 110 mm x 9 mm (7.3" x 4.3" x 0.35")

Peso: 240 g (1.63 lbs)

Características de la pantalla: LCD 1920 x 1200

#### Gabi™ Band

Dimensiones: 32 mm x 30 mm x 11.7 mm (1.3" x 1.2" x 0.5")

Peso: 9 g (0.02 lbs)

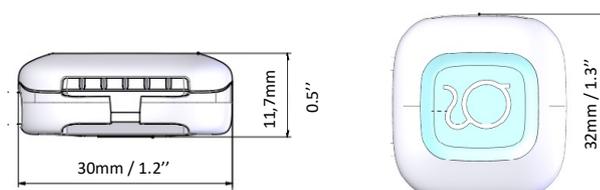


Figura 47: Dimensiones de la Gabi Band

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

## 7.5 Vida útil

La vida útil prevista del Gabi™ system es de 3 años.

## 7.6 Conformidad del producto

### Conformidad con los estándares

- IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, IEC 60601-1:2005/AMD2:2020
- IEC 60601-1-2:2014, IEC60601-1-2:2014/AMD1:2020
- ISO 80601-2-61:2017
- IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013 y IEC 62366-1:2007/AMD1:2014
- IEC 60601-1-11:2015
- IEC 62304:2006/AMD1:2015

### Clasificación de los equipos

- Tipo de protección contra descargas eléctricas: Clase II (alimentación CA)/Alimentación interna (alimentación por batería)
- Grado de protección de descarga eléctrica: A prueba de desfibrilación Tipo BF-pieza aplicada
- Modo de funcionamiento: Funcionamiento continuo
- Clase electromagnética: Clase B
- Grupo electromagnético: Grupo 1
- Protección contra daños causados por la entrada de sólidos y líquidos: IP67 para la Gabi Band

## 7.7 Declaración del fabricante

### **ADVERTENCIA:**

Este equipo médico eléctrico (ME) puede causar interferencias de radio o alterar el funcionamiento de equipos cercanos, independientemente de si cumple o no con los estándares CISPR. Puede ser necesario tomar medidas de mitigación, como reorientar o reubicar el equipo ME o proteger la ubicación.

### **ADVERTENCIA:**

El uso de accesorios, sensores y cables distintos de los especificados puede dar lugar a lecturas inexactas del equipo ME y a un aumento de la emisión de EMI o a una disminución de la inmunidad electromagnética del equipo ME.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

 **ADVERTENCIA:**

Los equipos de comunicaciones de RF portátiles (incluidos los periféricos, como cables de antena y antenas externas) no deben utilizarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del equipo ME, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, el rendimiento del equipo ME podría verse afectado.

 **ADVERTENCIA:**

El dispositivo no debe utilizarse junto a otros aparatos ni apilado con ellos. Si es necesario el uso adyacente o apilado, se debe observar el dispositivo para verificar el funcionamiento normal en la configuración en la que se utilizará.

 **Precaución:**

Cuando utilice el equipo ME, deberá tomar precauciones especiales relacionadas con la compatibilidad electromagnética (CEM). Instale el equipo ME de acuerdo con la información sobre compatibilidad electromagnética incluida en este manual.

#### 7.7.1 Compatibilidad electromagnética (CEM)

El Gabi™ system es apto para su uso únicamente en los entornos electromagnéticos especificados, de conformidad con el estándar IEC 60601-1-2:2014, IEC60601-1-2:2014/AMD1:2020. El Gabi™ system requiere precauciones especiales durante la instalación y el funcionamiento por motivos de compatibilidad electromagnética. En particular, el uso de equipos de comunicaciones móviles o portátiles cercanos puede influir en el rendimiento del Gabi™ system.

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación de este equipo no aprobado expresamente por Gabi SmartCare puede causar interferencias de radiofrecuencia perjudiciales y anular su autorización para utilizar este equipo.

Las características de emisiones de este equipo lo hacen adecuado para su uso en un entorno residencial (para el que normalmente se requiere cumplir con el estándar CISPR 11 clase B). Este equipo podría no ofrecer una protección adecuada para los servicios de comunicación por radiofrecuencia. El usuario podría tener que tomar medidas paliativas, como reubicar o reorientar el equipo.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

*NOTA: La FCC define "interferencia perjudicial" en el título 47 del CFR Sección 2.1 de la siguiente manera: interferencia que pone en peligro el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que degrada gravemente, obstruye o interrumpe repetidamente un servicio de radiocomunicación que funciona de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones [de la UIT].*

Orientación y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas (IEC/EN 60601-1-2)			
El equipo ME está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del equipo ME deberá asegurarse de que se utiliza en un entorno de este tipo.			
Prueba de emisiones	de	Conformidad	Orientación sobre el entorno electromagnético
Emisiones de RF CISPR 11		Grupo 1, Clase B	El equipo ME utiliza energía de radiofrecuencia solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencias en los equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de armónicos IEC/EN 61000-3-2		Clase A	Adecuado para su uso en todos los establecimientos, incluidos los entornos domésticos y los conectados directamente a la red pública de suministro eléctrico de bajo voltaje que abastece a los edificios utilizados con fines domésticos.
Fluctuaciones de voltaje y del flicker IEC 61000-3-3		Conforme	

Orientación y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética (IEC/EN 60601-1-2)			
El equipo ME está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del equipo ME deberá asegurarse de que se utiliza en un entorno de este tipo.			
Prueba de inmunidad	IEC/EN 60601-1-2 nivel de prueba	Nivel de conformidad	Orientación sobre el entorno electromagnético

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

<p>Descarga electrostática (ESD) IEC/EN 61000-4-2</p>	<p>+/-8 kV (Contacto) +/-15 kV (Aire)</p>	<p>+/-8 kV (Contacto) +/-15 kV (Aire)</p>	<p>El suelo debe ser de madera, concreto o baldosas de cerámica. Si los suelos están recubiertos de material sintético, la humedad relativa debe ser como mínimo del 30 %.</p>
<p>Transitorios eléctricos rápidos/ráfagas IEC/EN 61000-4-4</p>	<p>+/- 2 kV para líneas eléctricas</p>		<p>La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario normal.</p>
<p>Sobretensión IEC/EN 61000-4-5</p>	<p>+/-1 kV en modo diferencial +/-2 kV en modo común</p>		<p>La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario normal.</p>
<p>Caídas de voltaje, interrupciones breves y variaciones de voltaje en el suministro eléctrico IEC/EN 61000-4-11</p>	<p>0 % UT; 0.5 ciclos A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0 % UT; 1 ciclo y 70 % UT; 25/30 ciclos. Monofásico: a 0° 0 % UT; 250/300 ciclos.</p>		<p>La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario normal.</p>
<p>Campo magnético de frecuencia de alimentación (50/60 Hz) IEC/EN 61000-4-8</p>	<p>30 A/m</p>	<p>30 A/m</p>	<p>Los campos magnéticos de frecuencia de potencia deben estar a niveles característicos de una ubicación normal en un entorno hospitalario normal.</p>

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

Orientación y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética (IEC/EN 60601-1-2)			
El equipo ME está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del equipo ME deberá asegurarse de que se utiliza en un entorno de este tipo.			
Prueba de inmunidad	IEC/EN 60601-1-2 nivel de prueba	Nivel de conformidad	Orientación sobre el entorno electromagnético
RF conducida IEC 61000-4-6	3 V y 6 V 150 kHz a 80 MHz	3 V y 6 V	Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles no deben utilizarse más cerca de ninguna parte del equipo ME, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.  <b><u>Distancia de separación recomendada</u></b>  $d = 1.2\sqrt{P}$
RF radiada IEC 61000-4-3	30 V/m 80 MHz a 2.5 GHz	28 V/m	$d = 1.2\sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz
	10 V/m 6 GHz	9 V/m	$d = 2.3\sqrt{P}$ 800 MHz a 2.7 GHz  donde P es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

			<p>Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, determinadas mediante un estudio electromagnético del emplazamiento<sup>a</sup>, deben ser inferiores al nivel de conformidad en cada rango de frecuencias<sup>b</sup>. Pueden producirse interferencias en las proximidades de equipos marcados con el siguiente símbolo:</p> <div style="text-align: center;">  </div>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencias más alto.

NOTA 2: Estas pautas pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.

<sup>a</sup>Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para radioteléfonos (celulares/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, emisiones de radio AM y FM y emisiones de televisión no pueden predecirse teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de RF fijos, debe considerarse la posibilidad de realizar un estudio electromagnético del emplazamiento. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se utiliza el equipo ME supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable indicado anteriormente, deberá observarse el sistema de monitoreo para verificar su funcionamiento normal. Si se observa un funcionamiento anómalo, puede ser necesario adoptar medidas adicionales, como reorientar o reubicar el equipo ME.

<sup>b</sup>En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

## 8. Resolución de problemas

Esta sección detalla la resolución de problemas para el Gabi™ system. Si no encuentra respuesta a su pregunta o problema, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

### 8.1 Resolución de problemas específicos de la Gabi™ Band

Puede consultar un resumen de las indicaciones luminosas de la Gabi™ Band en la Sección 9.

#### 8.1.1 La luz blanca de la Gabi™ Band no parpadea al conectarse el cargador

Si la luz blanca de la Gabi™ Band no parpadea al conectarla al cargador, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que el cable de carga de la Gabi™ Band está correctamente conectado al puerto de carga e insertado en el receptáculo USB del adaptador de corriente. Asegúrese de que el adaptador de corriente esté enchufado a un tomacorriente.
2. Desconecte el cable de carga de la Gabi™ Band y vuelva a conectarlo.
3. Si la luz blanca sigue sin parpadear y no aparece ninguna luz en la Gabi™ Band después de 10 segundos, comuníquese con el servicio de atención al cliente lo antes posible.



Figura 48: luz blanca en la Gabi Band

#### 8.1.2 Las luces verde y roja de la parte inferior del sensor de la Gabi™ Band no parpadean al desconectarla del cargador

Si las luces verde y roja de la parte inferior del sensor de la Gabi™ Band no parpadean al desconectarla del cargador, siga estos pasos:

1. Desconecte el adaptador de corriente de la Gabi™ Band del tomacorriente.
2. Asegúrese de que la Gabi™ Band está correctamente conectada a su cable de carga y al adaptador de corriente.
3. Conecte el adaptador de corriente de la Gabi™ Band a un tomacorriente y espere 10 segundos hasta que la luz blanca de la Gabi™ Band parpadee. A continuación, desconecte el cable de carga de la Gabi™ Band.
4. Si las luces verde y roja de la parte inferior del sensor siguen sin parpadear, compruebe si hay una luz morada parpadeante en la parte superior de la Gabi™ Band:
  - a. En caso afirmativo, significa que la batería de la Gabi™ Band está agotada y que la Gabi™ Band debe cargarse antes de su uso (consulte la Sección 8.1.4 para obtener información más detallada).

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

- b. Si no es así, considere la posibilidad de que haya alteraciones electromagnéticas que estén afectando al dispositivo. Reubique o reoriente el equipo o apague el equipo que origina la alteración.
5. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de atención al cliente lo antes posible.



Figura 49: Luces verde y roja en la parte inferior del sensor

### 8.1.3 Se enciende una luz amarilla, en la parte superior de la Gabi™ Band

Si la luz amarilla está fija en la Gabi™ Band, significa que el software de la Gabi™ Band se está actualizando. No desconecte la Gabi™ Band de su cargador hasta que la luz amarilla se apague y la luz se vuelva blanca (parpadeante o fija).



Figura 50: luz amarilla en la Gabi Band

### 8.1.4 Una luz morada parpadea en la parte superior de la Gabi™ Band

Si la luz morada parpadea en la parte superior de la Gabi™ Band, significa que la batería de la Gabi™ Band está baja y debe cargarse antes de usarla. Si esto ocurre, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Conecte la Gabi™ Band a su cargador.
2. Asegúrese de que el cargador esté conectado a un tomacorriente.
3. Asegúrese de que parpadea una luz blanca en la parte superior de la Gabi™ Band, lo que indica que se está cargando.
4. Cuando esté completamente cargada, se encenderá una luz blanca fija.

	PEDIARITY™ Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	Versión L 09 de enero de 2024



Figura 51: luz morada en la Gabi Band

### 8.1.5 No estoy seguro de haber colocado la Gabi™ Band correctamente

Si no está seguro de haber colocado correctamente la Gabi™ Band, consulte la Sección 4.4.1 para una colocación óptima y realice las comprobaciones que se indican a continuación:

- La Gabi™ Band se sitúa a medio camino entre el hombro y el codo.
- La Gabi™ Band está en contacto directo con la piel del niño.
- El brazalete se aprieta lo suficiente para impedir que la Gabi™ Band se mueva o gire.
- El brazalete no está lo suficientemente apretado para permitir que la sangre circule con normalidad.

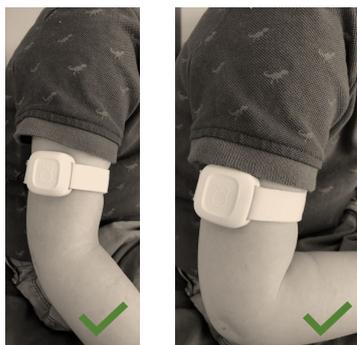


Figura 52: posicionamiento correcto de la Gabi Band

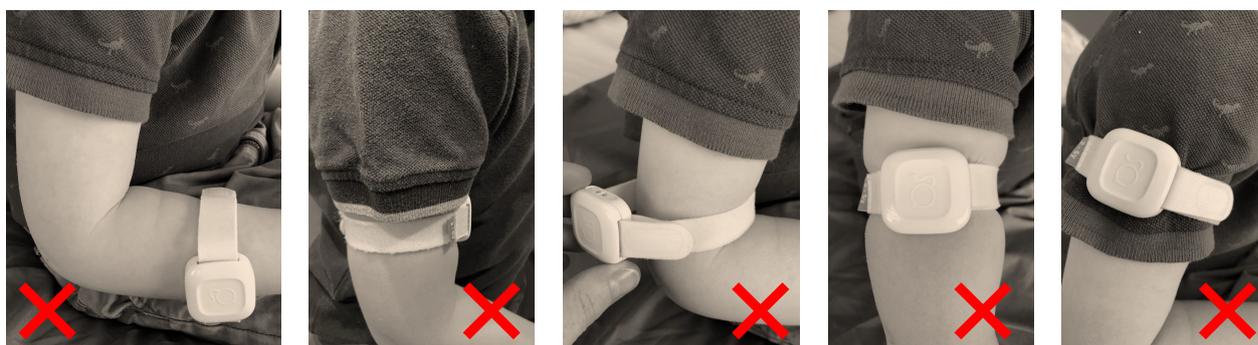


Figura 53: posicionamientos incorrectos de la Gabi Band

### 8.1.6 Mi hijo tiene marcas rojas en el lugar de aplicación de la Gabi™ Band

Tenga en cuenta que pueden aparecer marcas ligeras y temporales después de llevar puesta la Gabi Band durante varias horas. Deberían desaparecer aproximadamente 10 minutos después de retirar el dispositivo.

	<b>Pediarity™</b> Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	<b>Versión L</b>
		09 de enero de 2024

Las marcas rojas en la piel suelen producirse por una combinación de presión, humedad y fricción.

Para minimizar el riesgo, siga estas instrucciones:

- 1- alterne el brazo utilizado para portar el sensor
- 2- minimice la humedad bajo el sensor asegurándose de que la parte superior del brazo esté completamente seca y evitando aplicar loción o cualquier producto para la piel debajo del dispositivo
- 3- coloque el dispositivo correctamente y no lo apriete demasiado
- 4- compruebe que la parte del gancho del brazalete no esté en contacto con la piel del niño
- 5- limpie el dispositivo con frecuencia, siguiendo las instrucciones de limpieza (consulte 3.3.4 Limpieza de la Gabi™ Band en la Página 11)

## 8.2 Resolución de problemas específicos de la Gabi™ Monitor App

### 8.2.1 No puedo iniciar el registro y la conexión con la Gabi Band está en rojo

Si el estado de la conexión con la Gabi Band está en rojo, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Agite la Gabi™ Band para encenderla
2. Compruebe que la Gabi™ Band está dentro del alcance, es decir, a menos de 7 metros (23 pies) de la tablet.
3. Si el problema persiste, conecte la Gabi™ Band a su cargador, una vez enchufado, la conexión con la Gabi Band debería volverse verde indicando que la Gabi™ Band está conectada.

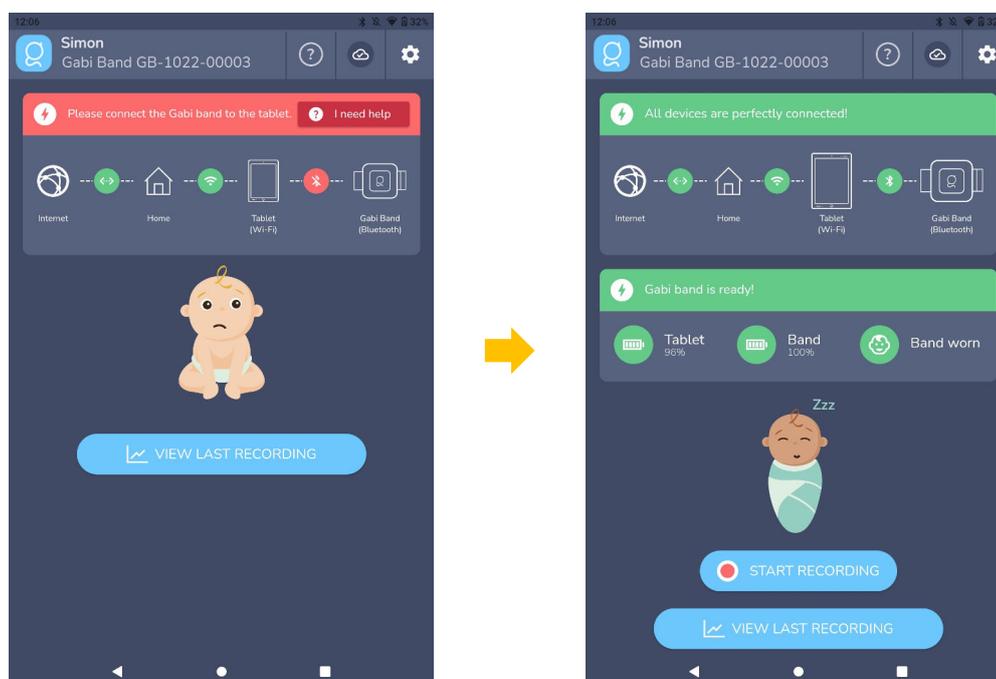


Figura 54: problema en la conexión con la Gabi Band

	PEDIARITY™ Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	Versión L
		09 de enero de 2024

- Si el problema persiste, reinicie la Gabi™ Monitor Tablet manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que se apague. A continuación, pulse de nuevo el botón de encendido para volver a encender la Gabi™ Monitor Tablet.

### 8.2.2 La conexión a internet es de color naranja

Si la conexión con su casa e internet es naranja, significa que la tablet no está conectada a la red wifi. Siga los pasos que se indican a continuación:

- Compruebe que la tablet está cerca del punto de acceso wifi
- Compruebe los ajustes de wifi (mediante los parámetros o el botón "Necesito ayuda") y actualice si es necesario

Tenga en cuenta que si la tablet no está conectada a Internet **durante** el registro, esto no impedirá que su médico reciba los datos del registro posteriormente, cuando se restablezca la conexión. Sin embargo, no podrá utilizar una aplicación de acompañamiento.

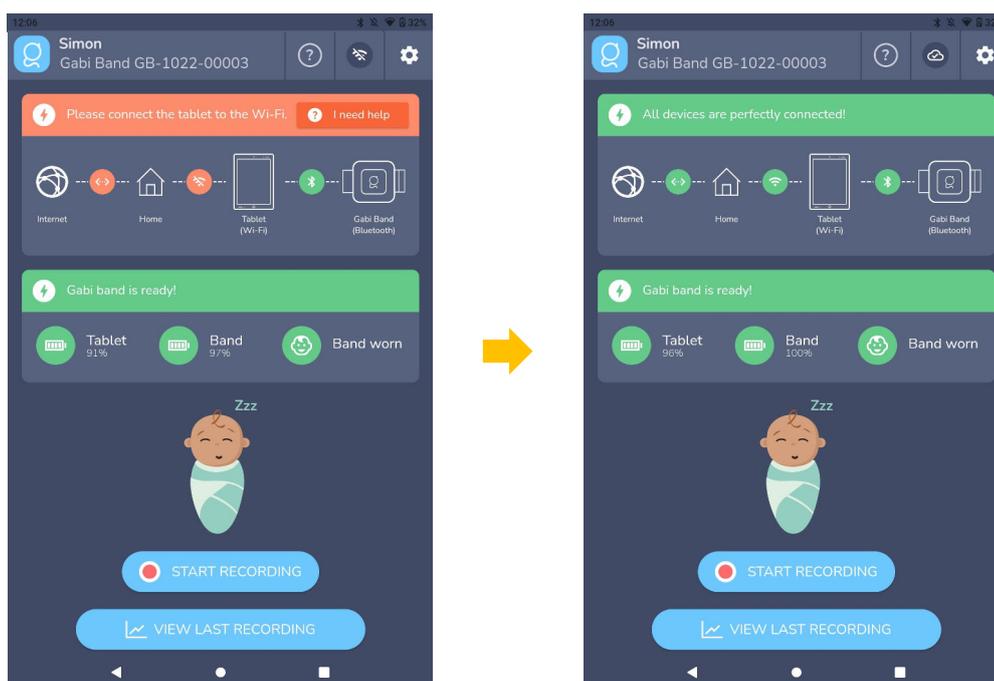


Figura 55: la conexión wifi es de color naranja

### 8.2.3 No puedo iniciar el registro y el icono de "Batería" está en rojo

Si no puede iniciar el registro y el estado de la batería es rojo, significa que la batería de la Gabi™ Band no está suficientemente cargada para realizar un registro. Cargue la Gabi™ Band antes de proceder al siguiente registro (el nivel de batería deberá alcanzar un mínimo del 6 %).

	<b>Pediarity™</b> Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	<b>Versión L</b>
		09 de enero de 2024



Figura 56: el nivel de la batería es crítico (icono rojo)

#### 8.2.4 Puedo iniciar el registro pero el icono "Batería" está de color naranja

El icono de la batería se vuelve de color naranja cuando el estado de carga de la batería de la Gabi™ Band es inferior al 25 % de su capacidad. Sin embargo, los registros seguirán permitiéndose si el nivel de batería se mantiene entre el 5 % y el 25 %.

Le recomendamos encarecidamente que conecte la Gabi™ Band a su cargador cuando no la utilice para garantizar una capacidad de batería suficiente para el siguiente registro.

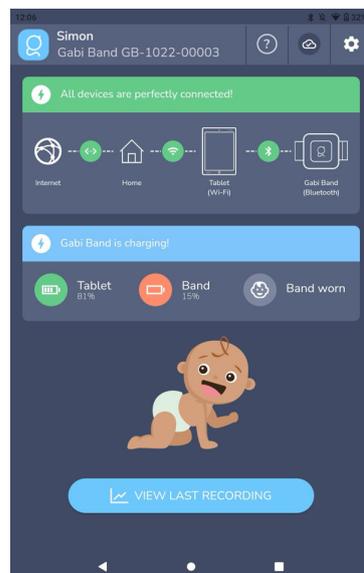


Figura 57: El nivel de la batería es bajo (icono naranja)


	<b>Pediarity™</b> Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	<b>Versión L</b>
		09 de enero de 2024

### 8.2.5 Hay archivos que no se suben a Gabi Cloud

Si el icono de Gabi Cloud tiene un chip con un número de archivos no cargados, significa que los datos recopilados por la Gabi™ Band durante el último registro o registros no se han podido cargar en Gabi Cloud y, por lo tanto, no se han podido enviar a su médico. Esto ocurre cuando la tablet no está conectada a wifi al pulsar "Stop recording" (Detener registro).

Para enviar los registros pendientes de Gabi, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Haga clic en el icono rojo de Gabi Cloud 
2. Si la Gabi™ Monitor Tablet no está conectada a wifi, conéctela a wifi acercándola a su punto de acceso wifi.
3. Haga clic en "Upload data" (Cargar datos). La lista "datos pendientes de carga" debería borrarse y el icono de Gabi Cloud debería volver a cambiar a .

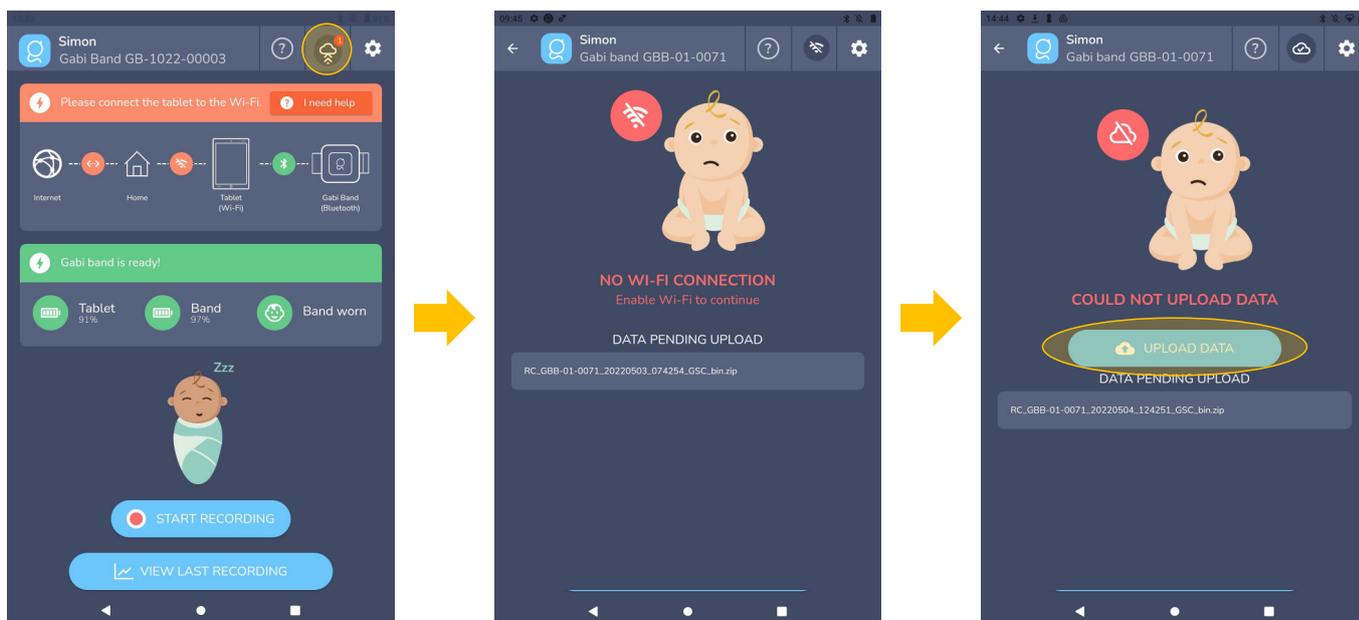

	<b>Pediarity™</b> Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	Versión L
		09 de enero de 2024

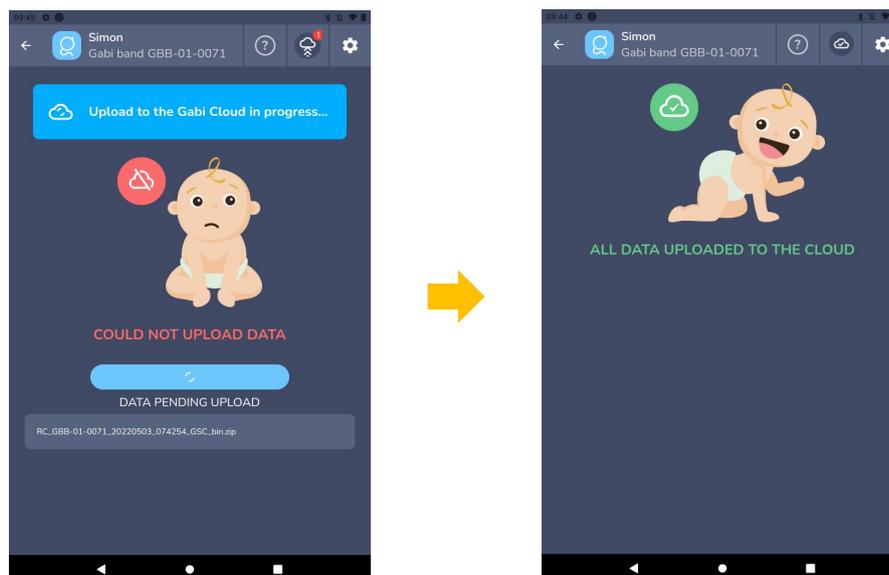


Figura 58: Carga de datos en Gabi Cloud

4. Si la carga vuelve a fallar, compruebe que la tablet esté conectada a wifi:
  - a. Vaya a la página "Settings" (Ajustes).
  - b. A continuación, haga clic en "Wi-Fi settings" (Ajustes de wifi).
  - c. Compruebe que la conexión wifi esté activada y, si no lo está, actívela y seleccione el nombre de red wifi adecuado.
5. Una vez hecho esto, vuelva a la Gabi™ Monitor App y repita los pasos 1 a 3.
6. Si el problema persiste, reinicie la tablet manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que se apague. A continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender la tablet. Repita los pasos 1, 2 y 3 anteriores.
7. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de atención al cliente lo antes posible.

#### 8.2.6 La Gabi™ Monitor App se carga sin cesar al intentar abrirla

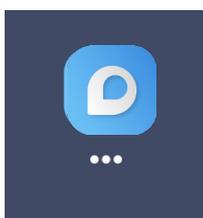


Figura 59: pantalla de carga de la Gabi Monitor App

Si la Gabi™ Monitor App se carga sin cesar al intentar abrirla, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Reinicie la tablet manteniendo pulsado el botón de encendido (consulte el botón C de la Figura 2 en la Página 14) hasta que la tablet se apague. A continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para encender la tablet.
2. Intente abrir la Gabi™ Monitor App de nuevo. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de atención al cliente lo antes posible.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

## 8.3 Resolución de problemas específicos de la tablet

### 8.3.1 La tablet no se enciende

Si la tablet no se enciende, conéctela a su cargador y espere unos minutos; a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido (consulte el botón C de la Figura 2 en la Página 14) hasta que la tablet se encienda. Podría aparecer un símbolo de batería, lo que significa que la batería de la tablet está totalmente agotada.

Si la tablet sigue sin encenderse, asegúrese de que el cable de carga micro-USB esté correctamente insertado en la tablet y de que el otro extremo del cable de carga esté correctamente conectado al receptáculo USB del adaptador de corriente. Asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado a un tomacorriente que funcione.

Si la tablet sigue sin encenderse, considere la posibilidad de que haya alteraciones electromagnéticas que afecten al dispositivo. Reubique o reoriente el equipo o apague el equipo que origina la alteración.

Si el problema sigue sin resolverse, comuníquese con el servicio de atención al cliente lo antes posible.


	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

## 9. Indicaciones luminosas de la Gabi™ Band

En la tabla siguiente se ofrece un resumen de las indicaciones luminosas de la Gabi™ Band y su significado.

Color	Estado	Significado
Luz blanca 	Parpadean do cada segundo	La Gabi™ Band está conectada al adaptador de corriente y la batería se está cargando.
	Fija	La Gabi™ Band está conectada al adaptador de corriente y la batería está completamente cargada.
Luz verde 	Fija	La Gabi™ Band está en contacto con la piel y lista para el registro.
Luz morada 	Parpadean do cada segundo	El estado de carga de la batería de la Gabi™ Band es muy bajo y debe cargarse antes de su uso. Siga las instrucciones para cargar la Gabi™ Band.

	Pediarity™ Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	Versión L
		09 de enero de 2024

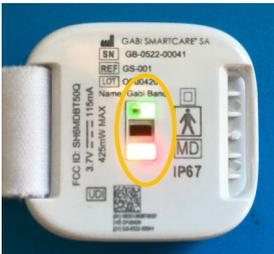Luz azul 	Fija	El emparejamiento entre la Gabi™ Band y la Gabi™ Monitor Tablet está en curso.
Luz amarilla 	Fija	La Gabi™ Band está conectada al cargador y se está realizando una actualización del software. ⚠ No desconecte la Gabi™ Band de su cargador durante esta operación.
Luz roja 	Fija	Se ha producido un error en su Gabi™ Band. Intente actualizar el firmware. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de atención al cliente lo antes posible.
Luces verde y roja de la unidad del sensor 	Parpadean do cada 5 segundos	La Gabi™ Band está lista para ponerse en contacto con la piel y comprueba cada 5 segundos si se lleva puesta o no.


	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

## 10. Símbolos en el etiquetado de productos o envases

### 10.1 Símbolos de certificación y seguridad

	Dispositivo médico
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Identificador único de dispositivo
	Número de modelo
	Número de serie
	Marca de conformidad con el Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos 2017/745
	Recolección y reciclaje separado de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
	Restricción de sustancias peligrosas
	Licencias de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
	Consulte las instrucciones de uso
	Mantener seco
	Precaución: La Ley Federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa
	Código del lote
	Rango de temperatura de almacenamiento

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

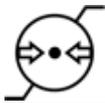	Rango de humedad de almacenamiento
	Rango de presión atmosférica de almacenamiento
	Clase eléctrica II (alimentado por una fuente externa sin tierra de protección confiable)
	Pieza aplicada de tipo BF
IP67	Protección contra la entrada 67
	Corriente continua (alimentación CC)
	Debe leerse el manual/folleto de instrucciones
	El dispositivo no es estéril
	No incluye alarmas de SpO2
	La RM no es segura

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

## 11. Información adicional

### 11.1 Estudios clínicos

Consulte 7.2.1 Alcance y precisión de la biometría en la Página 49.

### 11.2 Información sobre enfermedades y cuidados personales

El Gabi™ system no sustituye la supervisión de los padres.

El Gabi™ system no pretende sustituir la atención de un profesional médico, incluidos la receta, el diagnóstico o el tratamiento.

La televigilancia no sustituye a las visitas periódicas de chequeo con su médico. Consulte a su médico en caso de síntomas graves y persistentes.

### 11.3 Eventos adversos

En caso de eventos adversos o si tiene algún problema técnico, comuníquese con nosotros:

- Registre el número de serie del dispositivo.
- Comuníquese con Gabi SmartCare® S.A (consulte la información de contacto en el capítulo 12 Información de asistencia al usuario en la Página 76) o con su distribuidor local

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo también debe notificarse a su Autoridad Competente con respecto a su normativa local.

### 11.4 Garantía

Se aplicarán las Condiciones Generales de Venta de Gabi SmartCare® S.A. vigentes en cada momento. Los acuerdos divergentes de estas Condiciones Generales no restringen los derechos legales del comprador. Cualquier garantía que supere las disposiciones anteriores requerirá una forma contractual y excluirá el vandalismo relacionado con los componentes y los consumibles. En virtud de esta garantía, Gabi SmartCare® S.A subsanará gratuitamente cualquier defecto debido a mano de obra defectuosa o al uso de materiales defectuosos, ya sea a través de nuestro servicio de atención al cliente o directamente en fábrica. Esto no amplía la garantía de la unidad.

### 11.5 Procedimiento de devolución

Antes de devolver un componente del Gabi™ system para su reparación, comuníquese con Gabi SmartCare® S.A. o con su distribuidor, indique el número de serie de su dispositivo y solicite un número de devolución. Incluya este número cuando envíe el dispositivo.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

## 11.6 Viajes o uso internacional

Si desea utilizar el Gabi™ system en el extranjero, necesitará un adaptador de corriente con un enchufe adecuado. Los adaptadores de corriente suministrados con la Gabi™ Band y la Gabi™ Monitor Tablet admiten una voltaje de entrada universal, es decir: 100 a 240 V, 50 a 60 Hz. Por lo tanto, es posible que necesite un convertidor para distintos tipos de enchufe, pero no necesitará un convertidor de potencia adicional.

Tanto la Gabi™ Band como la Gabi™ Monitor Tablet incluyen baterías de iones de litio. Por lo tanto, cuando vuele con el Gabi™ system es posible que tenga que colocar los dispositivos en su equipaje de mano en lugar de en el de bodega. Asegúrese de comprobar las normas y reglamentos de su aerolínea específica.

	Pediarity™	Versión L
	Instrucciones de uso para el cuidador – Versión en español	09 de enero de 2024

## 12. Información de asistencia al usuario

GABI SMARTCARE® SA

Rue Emile Francqui, 6

1435 Mont-Saint-Guibert

Bélgica

Nombre del dispositivo: Pediarity

Número de modelo: GSK-201

Para ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente:

Correo electrónico: [support@gabismartcare.com](mailto:support@gabismartcare.com)

Notas:

Proveedor de equipos médicos: \_\_\_\_\_

Agencia de atención de la salud a domicilio: \_\_\_\_\_

Médico: \_\_\_\_\_

Remisión para la eliminación del dispositivo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_